

Finalidade: Máscara reanimadora. Projetado para caber sobre a boca e o nariz para administrar oxigênio.

Características: Material PVC

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe IIa

Modelo: RA442

Marca: Easyred

Dimensões: Tamanho 2

Certificado CE: 10000368141-PA-NA-TWN

Fabricante: Headstar Medical Products Co., Ltd.

Morada do fabricante: 9F, No. 288, Sec. 2, New Taipei Blvd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan

Distribuidor europeu: Moretti S.p.A.

Morada do distribuidor europeu: Via Bruxelles 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com -Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Armazenar em local seco, afastado de fontes de calor e da luz direta. Dispositivo para utilização em um único paciente. Não reutilizar, de forma a prevenir infeções cruzadas. Não mergulhar, enxaguar, lavar ou esterilizar o produto, uma vez que estes procedimentos podem deixar resíduos nocivos na máscara. Eliminar o dispositivo após a utilização.

Instruções de Utilização:

Ligue a máscara ao circuito de respiração ou ao dispositivo de reanimação e use a máscara sobre o nariz e a boca. Certifique-se de que todas as ligações são compatíveis e encaixam firmemente. Se necessário, prenda a máscara no anel do gancho com a correia da cabeça. Para uma vedação ótima, a almofada de enchimento de ar com válvula de insuflação para ajustar a pressão da braçadeira.

Imagens do Artigo:

