



## MÁSCARA DE REANIMAÇÃO

### Modelos

RA440	TAMANHO 0	RA443	TAMANHO 3
RA441	TAMANHO 1	RA444	TAMANHO 4
RA442	TAMANHO 2	RA445	TAMANHO 5

Projetado para caber sobre a boca e o nariz para administrar oxigênio.

**Material:** PVC

### Instruções de utilização

Ligue a máscara ao circuito de respiração ou ao dispositivo de reanimação e use a máscara sobre o nariz e a boca. Certifique-se de que todas as ligações são compatíveis e encaixam firmemente. Se necessário, prenda a máscara no anel do gancho com a correia da cabeça. Para uma vedação ótima, a almofada de enchimento de ar com válvula de insuflação para ajustar a pressão da braçadeira.

### Precauções

Verificar a permeabilidade ao fluxo de ar antes da utilização. Assegurar que existe fluxo de ar através da máscara e verificar a existência de fugas ou ligações soltas antes do uso. Para usar. Monitor resposta do paciente ao tratamento e fazer ajuste, se necessário. Armazenar em local seco, afastado de fontes de calor e da luz direta. Dispositivo para utilização em um único paciente. Não reutilizar, de forma a prevenir infecções cruzadas. Não mergulhar, enxaguar, lavar ou esterilizar o produto, uma vez que estes procedimentos podem deixar resíduos nocivos na máscara. Eliminar o dispositivo após a utilização.



Obelis S.A.  
Boulevard Général Wahis 53  
1030 Bruxelas, Bélgica

Headstar Medical Products Co., Ltd.

9F, nº 288, Sec. 2, New Taipei Blvd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, Taiwan, R.O.C [www.headstarmedical.com](http://www.headstarmedical.com)



Distrib. Moretti  
Cavriglia (AR) -  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)

S.P.A.  
Itália