

**Finalidade:** As compressas são destinadas ao tratamento e alívio de dores articulares e musculares. Devem ser aplicadas diretamente na zona dolorosa. A utilização a frio alivia, a longo prazo, dores moderadas a intensas. A

utilização a quente atenua, a curto prazo, dores ligeiras e crónicas.

**Características:** O produto é composto por uma embalagem exterior e um gel no interior. A embalagem exterior é composta por nylon, polietileno e tecido polar (capa). O gel é constituído por água purificada a 78,5%, glicerina a 20% e carboximetilcelulose de sódio a 1,5%.

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 835200 e 835201

**Marca:** IDENTITÉS

**Dimensões:**

835200 – 12 x 29 cm Peso: 0,33 kg

835201 – 20 x 29 cm Peso: 0,55 kg

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** IDENTITÉS

**Morada do fabricante:** ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie - 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 - Rio Maior geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** A falta de manutenção do produto pode causar riscos de lesões graves. Após a utilização, limpe com um pano húmido e deixe a compressa secar completamente ao ar antes de a reutilizar. Não é lavável na máquina. Não utilizar álcool ou outros solventes para limpar a compressa. Em caso de desgaste ou rasgão, não tente reparar o produto: deite-o fora ou contacte um revendedor autorizado para saber se pode ser encaminhado para o serviço pós-venda IDENTITES.

## Instruções de Utilização:

**Pra frio:** Guarde a compressa no congelador dentro de um saco de armazenamento pelo menos 2 horas antes da utilização. Verifique se a temperatura da compressa é adequada antes da aplicação.

**Método no micro-ondas:** Com a compressa à temperatura ambiente. Certifique-se de que o gel está distribuído uniformemente. Aqueça no micro-ondas durante 15 segundos. O micro-ondas aquece o gel de forma desigual e poderá encontrar algumas zonas da bolsa de gel mais quentes do que outras. Se for necessário mais calor, aqueça em intervalos de 5 segundos até atingir a temperatura desejada. Insira a compressa na capa antes de a utilizar.

**Tratamento:** Verifique se a compressa está danificada. Se estiver danificada, não utilize o produto. Conforme o objetivo do tratamento e as instruções de refrigeração/aquecimento acima descritas, arrefeça ou aqueça a compressa. Aplique o produto na área afetada durante um máximo de 20 minutos, com intervalos de 20 minutos entre aplicações. Se estiver demasiado quente ou demasiado fria, envolva a compressa numa toalha ou num pano macio antes de a aplicar na pele.

## Imagens do Artigo:

