

Finalidade: A Tornozeleira TB10A destina-se à estabilização, suporte e compressão da articulação do tornozelo. Está indicada na prevenção de lesões, no apoio ao tratamento de entorses ligeiras a moderadas, instabilidade ligamentar, tendinites e processos inflamatórios. Proporciona retenção de calor terapêutico, contribuindo para o alívio da dor, redução do edema e apoio ao processo de reabilitação funcional, permitindo mobilidade controlada da articulação.

Características: Fabricada em neopreno médico/sanitário. Isolamento térmico e retenção de calor. Compressão uniforme e estabilização do tornozelo. Elevada elasticidade e adaptação anatómica. Não limita a mobilidade funcional. Contribui para o alívio da dor e redução do edema.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: TB10A

Marca: EMO

Dimensões: Tamanho único

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: EMO

Morada do fabricante: ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L. Camino de La Pascualeta, 40 46200 Paiporta (Valencia) España

www.emo.es

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior
geral@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Lavar à mão com água morna e sabão neutro. Durante a lavagem, se as peças possuírem velcros, estes

devem ser colados entre eles ou mantê-los fechados. Secar à temperatura ambiente. Não estenda, nem passe a ferro a peça. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem deteriorar a peça.

Instruções de Utilização: Colocar a tornozeleira com o tornozelo em posição neutra (aprox. 90°). Se o modelo incluir correia pronadora, ajustá-la em formato de “oito” para reforço da estabilização. Caso disponha de placas maleolares, inseri-las nos respetivos bolsos laterais. Ajustar de forma simétrica, garantindo compressão adequada sem comprometer a circulação sanguínea.

Imagens do Artigo:

