

Finalidade: Órtese lombossacra ajustável indicada para estabilização e suporte da região lombar, auxiliando na redução da dor e proporcionando compressão e sustentação durante o tratamento de lombalgias, lombociatalgias, tensões musculares e outras afecções da coluna lombar.

Características: Órtese sacrolombar confeccionada com tecido elástico altamente respirável. Incorpora suportes lombares. Construção sem costuras: previne pressão excessiva e maximiza a leveza. Duas alças largas para facilitar a colocação. Fecho com microvelcro. Sem látex: hipoalergênica.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: FJ101

Marca: EMO

Dimensões: S (79-85 CM), M (85-91 CM), L (91-99 CM), XL (99-107 CM), XXL (107-115 CM), 3XL (115-126 CM).

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas

Morada do fabricante: Camino de La Pascualeta, 40 - 46200 Paiporta (Valencia), Espanha.

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com – Tel. 243 050 100.

Manutenção e armazenamento: Lavar manualmente com água fria e sabão neutro. Não utilizar alvejantes ou produtos abrasivos. Não passar a ferro. Não secar em máquina. Secar à sombra. Armazenar em local seco, limpo e protegido da umidade e luz solar direta. Manter o produto livre de objetos perfurantes ou cortantes para evitar danos ao material.

Instruções de Utilização: Posicione a órtese na região lombar, centralizando o produto nas costas. Envolver a cinta ao redor da cintura. Feche o velcro ajustando conforme o nível de compressão desejado. Ajuste as faixas elásticas adicionais para maior estabilização e conforto. Utilize conforme orientação médica ou profissional da saúde.

Imagens do Artigo:

