

**Finalidade:** Imobilizar e estabilizar a articulação do ombro, proporcionando suporte ao membro superior durante processos de recuperação pós-traumática ou pós-cirúrgica. Auxilia na limitação dos movimentos do ombro, mantendo o braço em posição funcional e confortável, contribuindo para redução da dor, proteção articular e prevenção de edema distal

**Características:** Imobiliza e estabiliza o ombro e braço. Fixação confortável ao tronco com ajuste em velcro. Distribui o peso do braço incluindo o cotovelo. Permite ajuste da flexão do cotovelo. Tecido respirável para maior conforto. Possui apoio para polegar e punho. Auxilia no controle dos movimentos do ombro e na redução de edema.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Cinza

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** SLG200

**Marca:** EMO

**Dimensões:** S , M , L

COMPRIMENTO DO COTOVELO AO PONTO DE FLEXÃO DOS DEDOS S (<35), M (35-40) , L (>41).

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortoédicas, S.L.

**Morada do fabricante:** Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40 - 46200 Paiporta (Valencia) España [www.emo.es](http://www.emo.es)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com) Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Lavar manualmente com água morna (máx. 30 °C) e sabão neutro. Manter os fechos em velcro fechados durante a lavagem. Secar à temperatura ambiente. Não utilizar ferro de passar. O contato com pomadas, cremes, álcool ou solventes pode danificar o produto.

**Instruções de Utilização:** Posicione o braço no suporte, mantendo o cotovelo corretamente acomodado. Coloque a faixa ao redor do ombro e ajuste o suporte de braço conforme necessário. Fixe os fechos em velcro ao tronco para garantir estabilidade e imobilização adequada. Ajuste a posição do cotovelo e utilize o apoio para o polegar para maior conforto. Certifique-se de que o suporte esteja firme, confortável e sem compressão excessiva. Utilize conforme orientação do profissional de saúde.

**Imagens do Artigo:**

