

Finalidade: A escada de cama foi desenvolvida para auxiliar o utilizador na transição da posição deitada para sentada na cama, promovendo maior autonomia, conforto e segurança durante a mobilização. Indicada para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, convalescentes ou utilizadores com dificuldade de movimentação.

Características: Comprimento ajustável. Estrutura em poliéster ultra-resistente. 3 barras de apoio com formato arredondado. Design leve, dobrável e de fácil transporte. Instalação simples.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 823036

Marca: Identités

Dimensões: Comprimento total: 2,10 m

Peso: 123 g

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira N.º15, Zona Industrial, 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com - 243050100

Manutenção e armazenamento: Limpar com pano macio e levemente umedecido. Não utilizar produtos abrasivos ou corrosivos. Verificar regularmente a fixação e o estado da estrutura da escada antes da utilização. Armazenar em local seco, limpo e protegido da umidade e da luz solar direta. Dobrar adequadamente após o uso para evitar danos ao material.

Instruções de Utilização: Fixar o produto de forma segura ao pé da cama ou à estrutura da cama, evitando fixação em ripas. Ajustar o comprimento conforme necessário. Para utilização, o utilizador deve segurar progressivamente nas barras de apoio para auxiliar a passagem da posição deitada para sentada. Verificar sempre a correta fixação antes de cada uso. Recomenda-se supervisão durante as primeiras utilizações por pessoas com mobilidade reduzida.

Imagens do Artigo:

