

Finalidade: Dispositivo destinado a auxiliar na transferência, posicionamento e mobilização de pacientes, permitindo ao cuidador realizar de forma segura a passagem entre posições (sentado, em pé, cama, cadeira de rodas, cadeira de banho, sanita ou veículo), bem como fornecer suporte durante o treino de marcha.

Características: Fixação com fecho de velcro duplo, tecido interno altamente antiderrapante e revestimento externo de elevada qualidade e resistência ao rasgo. Equipado com 4 alças de grandes dimensões distribuídas ao redor do cinto.

Lote: Ver embalagem

Cor: M: Cinza

L: Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 815217.M - 815217.L

Marca: Urathon

Dimensões:

Tamanho M para cintura entre 90 e 120 cm

Tamanho L para cintura entre 107 e 140 cm

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: Urathon Europe Limited

Morada do fabricante: Thane House, Hilmarton,
Wiltshire, SN11 8SB

Mandatário Europeu: Identites

Morada do Mandatário Europeu: Boulevard de la
Chanterie, 49124, Saint-Barthélemy-d'Anjou, FRANÇA

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio
Maior - qualidade@gerimais.com

Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar sempre que necessário com um pano húmido e sabão neutro. Não utilizar produtos abrasivos, solventes ou lixívia. Manter os fechos de velcro fechados durante a limpeza e o armazenamento, de forma a preservar a sua capacidade de fixação. Deixar secar naturalmente, afastado de fontes diretas de calor e da exposição prolongada à luz solar. Armazenar em local limpo, seco e protegido da humidade. Antes de cada utilização, verificar o estado geral do produto e assegurar que não apresenta sinais de desgaste ou danos.

Instruções de Utilização: Posicionar o cinto em torno da cintura ou das ancas do utilizador e ajustar de forma segura e confortável. Utilizar as alças para auxiliar nas transferências, mudanças de posição e apoio à marcha. Após a utilização, remover o cinto apenas quando o utilizador se encontrar numa posição estável e segura.

Imagens do Artigo:

