




CINTO DE TRANSFERÊNCIA DE DOENTES
Instruções de utilização - DISPOSITIVO MÉDICO

REF. 815217.M, 815217.L

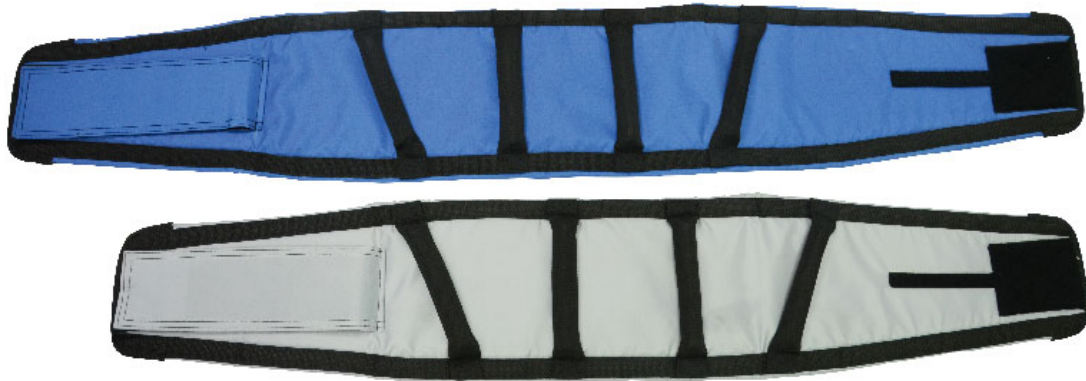

UTILIZAÇÃO PREVISTA

O cinto de transferência de pacientes pode ser utilizado em qualquer situação em que o cuidador necessite de uma aderência firme para ajudar e apoiar o utilizador. Tais situações podem incluir ajudar um utilizador a passar da posição sentada para a posição de pé e vice-versa, bem como o manuseamento, a colocação em pé e a sentar-se na cama, cadeira de rodas, veículo, cadeira de banho, sanita, etc.

Por fim, o cinto de transferência de pacientes pode ser utilizado para apoiar o paciente durante o treino de marcha.

INSTRUÇÕES DE USO DO CINTO DE TRANSFERÊNCIA



Ajuste: o suporte deve envolver a cintura ou as ancas do utilizador.

1. Certifique-se de que o cinto proporciona um bom apoio à volta da cintura do utilizador. Empurre as partes da fivela preta uma contra a outra até que fiquem bloqueadas. (Irá ouvir um clique.) Coloque rapidamente a alça de laço com a fivela plana sobre o poste no centro da alça do dispositivo de transferência do paciente.
2. Para apertar o D, segure a extremidade da correia com o anel em D e as alças funcionais no próprio cinto de transferência — puxe a correia enquanto segura a alça no cinto de transferência. O cinto de transferência aperta-se à volta do paciente.
3. Deve garantir-se que o cinto esteja firme, mas confortável para o paciente. O cinto de suporte deve ser afrouxado assim que o paciente tiver concluído o movimento de sentar-se à posição em pé. Após a transferência, desapertar o cinto e reajustá-lo apenas quando o utilizador estiver numa posição segura e confortável.

ESPECIFICAÇÕES

Fixação com fecho de velcro duplo, tecido interno antiderrapante e revestimento externo resistente a rasgos. Equipado com 4 alças ergonómicas distribuídas ao redor do cinto, proporcionando uma aderência segura e confortável durante a utilização.

O cinto possui ampla superfície de contacto, permitindo maior estabilidade e segurança ao utilizador durante as transferências e apoio à marcha. Fácil de ajustar, apertar e utilizar em diferentes posições.

Disponível em 2 tamanhos:

M: cintura entre 90 e 120 cm (cinza)

L: cintura entre 107 e 140 cm (azul)

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Limpar com pano húmido e sabão neutro, sempre que necessário. Não utilizar produtos abrasivos ou lixívia. Secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor e da luz solar. Armazenar em local limpo, seco e protegido da humidade. Verificar regularmente o estado do produto antes da utilização.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Verifique sempre o produto antes de o utilizar e após a lavagem.
- Nunca utilize um produto danificado. Se o produto apresentar sinais de desgaste, deve ser descartado.
- Leia estas instruções com atenção.
- É importante que os cuidadores recebam formação sobre manuseamento manual.
- Utilize sempre as técnicas corretas de manuseamento manual.
- Lembre-se de recorrer aos recursos próprios do utilizador.
- O cuidador não deve usar o cinto de transferência — se o utilizador perder o equilíbrio, o cuidador corre risco de cair com o utilizador e sofrer uma lesão de trabalho.
- Antes de utilizar o cinto de transferência para o manuseamento manual para a posição de pé ou para treino de marcha, o cuidador deve certificar-se de que o utilizador é capaz de ficar de pé
- Nunca deixe o cinto de transferência no chão
- Para garantir que o utilizador se sente seguro e que cada manuseamento manual é suave, planeie sempre o manuseamento manual com antecedência.

Em caso de dúvida, contacte a Urathon Europe Ltd.



Urathon Europe Limited,

Thane House, Hilmarton, Wiltshire, SN11 8SB, Reino Unido