

Finalidade: As cadeiras de rodas elétricas são adequadas para utilização em espaços interiores mais amplos, em caminhos de jardim e em estradas em boas condições nas imediações da casa.

Características: A Cadeira pode ser controlada pelo usuário através de um joystick (posicionável à direita ou à esquerda). Equipada com cinto de segurança e rodas anti-volteio. O travão eletromagnético permite que a cadeira de rodas trave e pare automaticamente para maior segurança. A cadeira de rodas é dobrável. Estrutura de alumínio; Dois motores de 180W; Bateria de lítio de 25,9V 10Ah; Velocidade máxima 6 km/h; Autonomia: 10 a 15 km

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (EU)2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 875039

Marca: Identites

Dimensões: 112 x L 60 x A 98 cm; Altura do assento 54 cm; Peso: 22 kg (20 kg sem bateria); Dimensões dobrada: 85 x 45 x 60 cm; Peso máximo do usuário 100 kg.

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)

Fabricante: DRAGON MEDICAL

Morada do fabricante: Room B2313-B2314, 13 block of Injoy Plaza, Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China

Distribuidor Europeu: IDENTITÉS

Morada do Distribuidor Europeu: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira N.º15, Zona Industrial, 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com - 243050100.

Manutenção e armazenamento: Desligue a cadeira de rodas antes da limpeza ou armazenamento, preferencialmente desconectando os conectores elétricos. Limpe a estrutura com um pano macio e ligeiramente húmido, sem utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Não lave diretamente com água nem exponha o equipamento à humidade excessiva. O assento e os apoios de braços podem ser limpos com pano húmido e sabão neutro, devendo ser bem secos após a limpeza. Armazene a cadeira em local seco, protegido de temperaturas extremas e humidade. Em períodos prolongados sem utilização, recomenda-se remover as baterias para evitar danos eletrónicos e oxidação. Evite que crianças ou pessoas não habilitadas utilizem a cadeira de rodas sem supervisão.

Instruções de Utilização: Antes da utilização, certifique-se de que a cadeira de rodas está corretamente desdobrada, bloqueada e com os conectores da bateria devidamente ligados.

Ligue o equipamento através do controlador e utilize o joystick para controlar a direção e velocidade da cadeira. Ao soltar o joystick, a cadeira trava automaticamente.

Recomenda-se iniciar a utilização em velocidade reduzida até adaptação completa ao equipamento.

A cadeira pode ser utilizada em modo elétrico ou manual, conforme necessidade. Não utilize o modo manual em inclinações ou sem auxílio de um acompanhante.

Antes de cada utilização, verifique o estado da bateria, travões, rodas e conexões elétricas.

Utilize sempre o equipamento em superfícies estáveis e evite obstáculos, inclinações acentuadas, escadas rolantes e ambientes excessivamente húmidos.

Imagens do Artigo:

