

**Finalidade:** Órtese para dedos das mãos e dos pés destinada à fixação, estabilização, imobilização e alinhamento de articulações lesionadas, auxiliando no tratamento e recuperação de entorses, traumatismos, lesões das articulações interfalângicas e fraturas estáveis não deslocadas, proporcionando proteção e suporte durante o processo de cicatrização.

**Características:** Feita de material têxtil laminado macio e confortável. Consiste em uma tira com uma alça na extremidade que permite fixar um dedo sobre o outro. A sua espessura facilita o uso com qualquer tipo de calçado. Possui uma camada interna antiderrapante. Fecho e ajuste por microvelcro. Sem látex.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Bege

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** BAN30

**Marca:** EMO

**Dimensões:** Comprimento: 3 cm.

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)**  
Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, S.L.

**Morada do fabricante:** Camino Pascualeta nº 40  
46200 Paiporta (Valencia) – Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira,  
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio  
Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

**Manutenção e armazenamento:** Lavar com água morna (máx. 30 °C) e sabão neutro, deixando secar ao ar. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Não expor ao calor direto ou à luz solar intensa. Evitar contacto com pós, cremes, álcool e solventes. Conservar à temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

**Instruções de Utilização:** Introduzir o dedo lesionado na alça posterior da órtese, envolver a cinta em torno do dedo adjacente e fechar com o velcro. Verificar regularmente o estado do produto e assegurar que a órtese se adapta corretamente à zona afetada, sem causar desconforto durante a utilização.

#### Imagens do Artigo:

