

Vendaje de dedos 30

Longitud 3 cm. **BAN30**

EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40. 46200 Paiporta (Valencia) Spain
emo@emo.es | www.emo.es | +34 963 132 051



MADE IN SPAIN



Longitud 3 cm.

BAN30



APTº PARA SU USO EN MANOS Y PIES



Vendaje de dedos 30

Finger bandage
Pansement au doigt
Fingerband
Bandaggio per le dita
Bandagem de dedo

Vendaje de dedos 30

BAN30 Longitud 3 cm.

CARACTERÍSTICAS Ortesis fabricada con un suave y cómodo material textil laminado. Consiste en una cinta con un bucle en el extremo que permite fijar un dedo sobre otro. Su mínimo espesor facilita su colocación con cualquier tipo de tiralazo. Incorpora lámina interior antideslizante. Cierre y ajuste mediante microvelcro. Libre de látex. Longitud 3 cm.

EFFECTOS Sujeción. Estabilización. Inmovilización. Protección. Aliviación de las articulaciones lesionadas de los dedos de las manos y pies.

INDICACIONES Esguince de dedos. Procesos dolorosos por traumatismo. Tratamiento de articulaciones interfalángicas distales y proximales. Fractura de dedos estable y no desplazada.

NORMATIVA Este producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO 14971) minimizando todos los riesgos existentes. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medicación.

MATERIALES Exterior: Poliamida; 100%. Interior: Poliuretano; 100%.

COLOCACIÓN La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. Introducir el dedo lesionado en el bucle que forma la ortesis. Posteriormente rodear con el extremo de la cinta el dedo sobre el que se va a fijar la ortesis y cerrar mediante velcro. El usuario debe examinar regularmente el producto para que se encuentre en perfecto estado y garantizar su correcto funcionamiento. La ortesis debe adaptarse a la zona afectada sin producir molestias o incomodidades durante su uso.

PRECAUCIONES Si se produce alguna reacción alérgica, irritación, alteración cutánea, hinchazón o padece cualquier tipo de sensibilización retirar el producto y consultar con el médico prescriptor o profesional sanitario. No utilizar directamente sobre cicatrices abiertas o enrojecidas sin estar debidamente protegidas. No exponer a una llama o fuente de calor a temperaturas muy elevadas.

ADVERTENCIAS La utilización de la ortesis está condicionada a las indicaciones. Para la correcta colocación de la ortesis siga las indicaciones del fabricante. Siga las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del profesional sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. El especialista se encargará de proporcionar la información necesaria para asegurar que el usuario final o la persona responsable de la colocación del producto entienda cómo utilizar el producto de manera segura. Producto no apto para su esterilización. Mantener fuera del alcance de los niños. Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material de éste, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la

autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

LAVADO Y MANTENIMIENTO Lavar periódicamente con agua tibia (máximo 30°), jabón neutro y dejar secar al aire. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados sobre la prenda. No exponer a fuentes de calor directas como superficies calientes, exposición directa al sol y otros focos de ignición. El contacto con pomadas, cremas, alcohol y disolventes puede deteriorar la prenda. Guardar la temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen.

CADUCIDAD 36 meses

VIDA ÚTIL, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTÍAS En caso de que detecte algún defecto dentro del plazo de garantía, tenga la amabilidad de ponerse en contacto con su distribuidor a fin de solucionar cuanto antes su

problema. La garantía no será válida si el producto ha sido dañado por uso inapropiado, o no se han seguido las instrucciones y recomendaciones de uso. Con un mantenimiento regular, el producto será fiable y duradero y podrá reutilizarse. Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable. Certificado Oeko-Tex Standard 100. Garantía dentro del marco de las disposiciones legales.

Fecha de publicación de la última revisión 03/2022.

CARACTERÍSTICAS: É fabricada com um material suave e resistente: tecido laminado. Consiste numa fita com uma presilha na extremidade que permite prender um dedo sobre o outro. A sua espessura reduzida facilita a colocação com qualquer tipo de laço. Incorpora uma lamina interior antiderrapante. Fecho de ajuste por microvelcro. Sem atacadores. Comprimento 3 cm.

EFFECTOS: Fixação. Estabilização. Imobilização. Protecção. Alívio das articulações lesionadas dos dedos das mãos e dos pés.

INDICAÇÕES: Entorse dos dedos. Processos ósseos por traumatismo. Tratamento das articulações interfalângicas distais e proximais. Fratura dos dedos estável e não deslocada.

NORMATIVA: Este produto de saúde cumpre o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho, bem como as normas relativas aos dispositivos médicos e as respectivas regulamentações nacionais. Foi realizada uma Análise de Riscos (UNE EN ISO 14971) para minimizar todos os riscos existentes. Dispositivo médico de Classe I, sem função de medição.

MATERIAIS: Exterior: 100% Poliamida; Interior: 100% Poliuretano.

COLOCAÇÃO: A escolha correta do tamanho é fundamental para garantir a máxima eficácia do tratamento, bem como prolongar a vida útil da órtese. Introduzir o dedo do lesionado na alça que se encontra na parte posterior da órtese. Em seguida, envolver com a extremidade da cinta dos dedos sobre a qual a ortese será fixada e fechar com velcro. O utilizador deve examinar regularmente o produto para se certificar de que se encontra em perfeito estado e garantir o seu correcto funcionamento. A ortese deve adaptar-se à zona afetada sem causar incómodos ou desconfortos durante a sua utilização.

PRECAUÇÕES: Se ocorrer alguma reação alérgica, irritação, alteração cutânea, inchaço ou se sofrer de qualquer tipo de sensibilização, retire o produto e consulte o médico prescriptor ou profissional de saúde. Não utilize diretamente sobre feridas abertas ou vermelhas sem estar devidamente protegidas. Não exponha a uma chama ou fonte de calor a temperaturas muito elevadas.

ADVERTÊNCIAS: A utilização da órtese está condicionada às indicações. Para a colocação correta da órtese, siga as indicações do fabricante. Siga as indicações ou recomendações do prescriptor ou do profissional de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. O especialista encarregado de fornecer as informações necessárias para garantir que o utilizador final ou a pessoa responsável pela colocação do produto compreenda como utilizar o produto de forma segura. Produto não destinado a uso doméstico. Mantenha fora do alcance das crianças. Para a eliminação do produto, utilize o contenedor de resíduos sólidos. Para a eliminação da embalagem, dependendo do material desta, utilize o contenedor de papel/cartão ou o contenedor de plástico. Em todos os casos, deve-se respeitar rigorosamente a legislação do país. Qualquer reação grave relacionada com o produto deve ser comunicada ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o

paciente se encontram estabelecidos.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO: Lavar periodicamente com água morna (máx. 30 °C), sabão neutro e deixar secar ao ar. Durante a lavagem, se a peça tiver velcros, estes devem ser colados entre si ou mantidos fechados sobre a peça. Não exponha a fontes de calor direto, nem a superfícies quentes, exposição direta ao sol e outras fontes de calor. O contacto com pós, cremes, álcool e solventes pode deteriorar a peça. Guarde-a à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

VALIDADE: 36 meses

VIDA ÚTIL, CERTIFICADOS DE QUALIDADE E GARANTIAS:

Caso detete algum defeito dentro do prazo de garantia, tenha a gentileza de entrar em contacto com o seu distribuidor para resolver o seu problema. A garantia não será válida se o produto tiver sido danificado devido a uso inadequado, ou se não tiverem sido seguidas as instruções e recomendações de uso. Com uma manutenção regular, o produto será fiável e duradouro e poderá ser reutilizado. Todos os materiais utilizados foram testados, cumprem a legislação nacional e as normas aplicáveis. Certificado Oeko-Tex Standard 100. Garantia no âmbito das disposições legais.

Data de publicação da última revisão: 03/2022.

 FABRICANTE
MANUFACTURER

 FECHA DE FABRICACIÓN
DATE OF MANUFACTURE

 PRODUCTO SANITARIO
MEDICAL DEVICE

 CADUCIDAD
EXPIRATION

 MANTENER SECO
KEEP DRY

 RECYCLADO
RECYCLED

 PUNTO VERDE
GREEN POINT

 CONSULTAR INSTRUCCIONES
CONSULT INSTRUCTIONS

 LOT
CÓDIGO DE LOTE
BATCH CODE

 REF
NÚMERO DE REFERENCIA
REFERENCE NUMBER

 CONFORMIDAD CE
CE CONFORMITY

 UN PACIENTE, MÚLTIPLES USOS.
SINGLE PATIENT, MULTIPLE USES.

 NO CONTIENE LÁTEX
DOES NOT CONTAIN LATEX

 MANTENER ALEJADO DE LA LUZ
KEEP AWAY FROM LIGHT

