

Silicoplast

Ortesis de silicona viscoelástica

órtese de sílicone viscoelàstica



EMO
especialista
en ortopedia

Juanetera
de silicona
Bunion shield
POD400



Tallas size S , L

MADE IN SPAIN



EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascueta, 40, 46200 Paiporta (Valencia) Spain
emo@emo.es | www.emo.es | +34 963 132 051

Ortesis de silicona viscoelástica

Silicoplast

órtese de sílicone viscoelàstica

POD400 Silicoplat Proteção para joanete

INDICAÇÕES: Protetor lateral para hálux valgo. Bursite do hálux valgo. Gota.

CARACTERÍSTICAS: Fixa-se colocando o anel no quinto dedo do pé, cobrindo a área lateral do joanete. Fabricado em silicone de grau médico ultra-suave. Forma e design anatómicos. Confortável de usar. Adapta-se à temperatura corporal. Lavável.

EFEITOS: Alívio lateral do hálux valgo. Proteção contra o atrito e a pressão lateral no joanete.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Lavar com água fria e sabão neutro e deixar secar ao ar. Polvilhar ligeiramente com talco. Guardar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

COLOCAÇÃO: A escolha do tamanho correto é crucial para alcançar a máxima eficácia do tratamento e prolongar a vida útil da órtese. Coloque a órtese conforme mostrado na imagem de apresentação.

REGULAMENTAÇÃO: Este dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos dispositivos médicos e com as respetivas regulamentações nacionais. Foi realizada uma Análise de Risco (UNE EN ISO 14971), minimizando todos os riscos existentes.

Dispositivo médico não esterilizado de Classe I, sem função de medição.

PRECAUÇÕES: Se ocorrer qualquer reação alérgica, irritação, alteração cutânea, inchaço ou sensibilidade, retire o produto e consulte o médico prescritor ou um profissional de saúde. Não utilize diretamente sobre cicatrizes abertas ou avermelhadas sem proteção adequada. Não exponha a chamas ou a altas temperaturas. A órtese deve assentar confortavelmente, mas não deve comprimir excessivamente. Verifique o ajuste do produto para garantir que está corretamente ajustado. Não aperte em excesso. Verifique regularmente se a circulação não está comprometida. Em caso de dúvida quanto à escolha do tamanho, opte sempre pelo tamanho maior. Os utilizadores devem inspecionar regularmente o produto para garantir que se encontra em perfeitas condições e a funcionar corretamente. Não utilize o produto se estiver danificado.

AVISOS: A utilização da órtese está sujeita às suas indicações. Recomenda-se que a órtese seja utilizada por um único paciente. Para a colocação adequada da órtese, siga as instruções do fabricante. Siga as recomendações do médico ou profissional de saúde que a prescreveu. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista.

O especialista fornecerá as informações necessárias para garantir que o utilizador final ou a pessoa responsável pela colocação do produto compreenda como utilizar o produto de forma segura. O produto não é adequado para esterilização. Manter fora do alcance das crianças. Elimine o produto em contentores de resíduos sólidos. Para a eliminação da embalagem, utilize o recipiente adequado para papel/cartão ou plástico, dependendo do material. Cumpra sempre rigorosamente a regulamentação nacional. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador e/ou paciente se encontra.

Data da última revisão 6/2024 V.01



FABRICANTE
FABRICANTE



CONSULTAR INSTRUCCIONES
CONSULTAR INSTRUÇÕES



FECHA DE FABRICACIÓN
Data de fabrico



LOT
CÓDIGO DE LOTE



PRODUCTO SANITARIO
Dispositivo médico



REF
NÚMERO DE REFERENCIA
NÚMERO DE REFERÊNCIA



CADUCIDAD
Validade



CONFORMIDAD CE
CONFORMIDADE CE



MANTENER SECO
Manter seco



UN PACIENTE. MÚLTIPLES USOS.
UM PACIENTE. MÚLTIPLOS USOS



RECICLADO
Reciclado



NO CONTIENE LÁTEX
NÃO CONTÉM LATEX



PUNTO VERDE
PONTO VERDE



MANTENER ALEJADO DE LA LUZ
MANTENHA AFASTADO DA LUZ

