

Finalidade: Auxiliar na correção e alinhamento do segundo dedo em garra, reduzindo a pressão e o atrito sobre a articulação interfalângica proximal. Também promove a separação entre o primeiro e o segundo dedo do pé, contribuindo para o alívio dos sintomas associados ao hallux valgus (joanete).

Características: Fabricado em silicone médico extra macio. Adapta-se à temperatura corporal para maior conforto. Lavável e reutilizável.

Lote: Ver embalagem

Cor: Transparente

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: POD900 T.M DRT

POD900 T.M ESQ

POD900 T.L DRT

POD900 T.L ESQ

Marca: EMO SILICOPLANT

Dimensões: Tamanhos M e L

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante: Camino Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia)

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,
nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior 2040-357 Rio
Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Lavar com água fria e sabão neutro. Deixar secar ao ar livre. Para melhor conservação, pode ser aplicada uma pequena quantidade de pó de talco. Guardar à temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Instruções de Utilização: Coloque a órtese entre o primeiro e o segundo dedo do pé, conforme ilustrado na imagem presente na embalagem. A escolha do tamanho adequado é fundamental para garantir a máxima eficácia do tratamento, o correto posicionamento da órtese e uma maior durabilidade do produto.

Imagens do Artigo:

