

Silicoplast

Ortesis de silicona viscoelástica

órtese de silicona viscoelástica



EMO
especialista
en ortopedia

Protector segundo dedo
en garra y separador

Second claw toe
protector

POD900



Tallas size S-M , L-XL LADO SIDE L - R

MADE IN SPAIN



EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascueta, 40, 46200 Paiporta (Valencia) Spain
emo@emo.es | www.emo.es | +34 963 132 051

Ortesis de silicona viscoelástica

Silicoplast

órtese de silicona viscoelástica

POD900 Silicoplat Protector segundo dedo em garra e separador

INDICAÇÕES. Calosidades superiores no segundo dedo em garra. Separação do primeiro dedo em hallux valgus.

CARACTERÍSTICAS. Coloca-se entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Elevação dorsal com posicionamento sobre a falange proximal para aliviar a pressão e o atrito na articulação interfalângica proximal. Fabricado em silicone médico extramacio.

Forma e design anatómicos. Confortável de usar.

Adapta-se à temperatura corporal. É lavável.

EFEITOS: Alívio da pressão e do atrito nas calosidades superiores do segundo dedo em garra. Alinha o primeiro dedo e o metatarso no hálux valgo. Devido à pressão do calçado sobre a elevação dorsal, tende a facilitar o alinhamento da falange proximal e do seu metatarso, facilitando também o alongamento da musculatura extensora da segunda articulação metatarsofalângica.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO: Lavar com água morna e sabão neutro e deixar secar ao ar. Polvilhar ligeiramente com talco. Guardar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

COLOCAÇÃO: A escolha correta do tamanho é fundamental para

obter a máxima eficácia do tratamento, bem como para prolongar a vida útil da órtese. Colocar a órtese tal como está representada na imagem da folha de apresentação.

NORMATIVA: Este dispositivo médico cumpre o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos dispositivos médicos e as respetivas regulamentações nacionais. Foi realizada uma Análise de Riscos (UNE EN ISO 14971), minimizando todos os riscos existentes. Dispositivo médico de Classe I, não esterilizado, sem função de medição.

PRECAUÇÕES: Caso ocorra alguma reação alérgica, irritação, alteração cutânea, inchaço ou se sofrer de qualquer tipo de sensibilização, retire o produto e consulte o médico prescritor ou profissional de saúde. Não utilizar diretamente sobre cicatrizes abertas ou avermelhadas sem que estas estejam devidamente protegidas. Não expor a chamas ou fontes de calor a temperaturas muito elevadas. A órtese deve ficar bem ajustada, mas não deve comprimir em excesso.

Verifique o ajuste do produto para se certificar de que assenta corretamente. Não aperte demasiado. Verifique regularmente se a circulação não está comprometida. Em caso de dúvida na escolha do tamanho, opte sempre pelo tamanho maior. O utilizador deve examinar regularmente o produto para se certificar de que se encontra em perfeito estado e garantir o seu correto funcionamento. Não utilize o produto se estiver danificado.

ADVERTÊNCIAS: A utilização da órtese está condicionada às indicações. Recomenda-se que a órtese seja utilizada por um único paciente. Para a colocação correta da órtese, siga as instruções do fabricante. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou do profissional de saúde.

Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista.

O especialista encarregar-se-á de fornecer as informações necessárias para garantir que o utilizador final ou a pessoa responsável pela colocação do produto compreenda como utilizar o produto de forma segura. Produto não adequado para esterilização. Manter fora do alcance das crianças. Para a eliminação do produto, utilize o contentor de resíduos sólidos. Para a eliminação da embalagem, dependendo do material desta, utilize o contentor de papel/cartão ou o contentor de plástico. Em qualquer caso, deve cumprir-se rigorosamente a legislação do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente estão estabelecidos.

Data da última revisão 6/2024 V.01



FABRICANTE
FABRICANTE



CONSULTAR INSTRUCCIONES
CONSULTAR INSTRUÇÕES



FECHA DE FABRICACIÓN
Data de fabrico



LOT
CÓDIGO DE LOTE



PRODUCTO SANITARIO
Dispositivo médico



REF
NÚMERO DE REFERENCIA
NÚMERO DE REFERÊNCIA



CADUCIDAD
Validade



CONFORMIDAD CE
CONFORMIDADE CE



MANTENER SECO
Manter seco



UN PACIENTE. MÚLTIPLES USOS.
UM PACIENTE. MÚLTIPLOS USOS



RECICLADO
Reciclado



NO CONTIENE LÁTEX
NÃO CONTÉM LATEX



PUNTO VERDE
PONTO VERDE



MANTENER ALEJADO DE LA LUZ
MANTENHA AFASTADO DA LUZ

