


Art.-Nr.	Description Bezeichnung	Height Hauteur Höhe	Width Largeur Breite	Depth/Profondeur Tiefe	Footprint/Dimensions Fußabdruck		
550806	Acces o bain	105 cm	69 cm	57.5 cm	34x37 cm	5.9 kg	150 kg

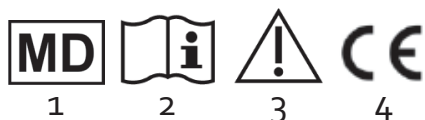

	PT	PL	HU	TR
	Dispositivo médico	Objaśnienia symboli	Szimbólumok jelentése	Sembollerin açıklamaları
1	Antes de utilizar, leia, por favor, o manual.	Wyrób medyczny	Orvosi eszköz	Tıbbi cihaz
2	Siga as instruções de segurança	Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót	Kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz
3	Certificado CE	Stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa.	Tartsa be a biztonsági utasításokat!	Güvenlik uyarılarını dikkate alınız
4	Significado dos símbolos	Deklaracja CE	CE megfeleléség	CE uygunluğu

PT-

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Siga as instruções e guarde-as cuidadosamente! Se este aparelho for utilizado por outras pessoas, estas devem ser devidamente informadas sobre as recomendações seguintes antes de qualquer utilização.

1. Instruções de segurança

- ♥ Consulte sempre o seu revendedor especializado para ajustar o aparelho e para aprender a utilizá-lo de forma adequada.
- ♥ Não armazene ao ar livre, não deixe ao sol (Cuidado para não deixar dentro de um carro exposto ao sol!!!).
- ♥ Não utilize em temperaturas extremas (superiores a cerca de 38 °C ou 100 °F ou inferiores a 0 °C ou 32 °F).

♥ Verifique regularmente todas as peças que compõem este artigo (parafusos, tubos, quadro...).

- ♥ Verifique se todas as ligações aparafusadas estão bem apertadas. Não utilize para outro fim que não aquele para o qual este produto foi concebido.
- ♥ Respeite SEMPRE os limites de peso indicados na etiqueta ou no manual.
- ♥ Não altere este artigo. Em caso de necessidade, utilize apenas peças originais para o reparar. Apenas pessoal qualificado está habilitado a reparar este artigo.
- ♥ Depois de ter desdobrado ou montado o produto, certifique-se de que este está bloqueado na posição ABERTA e que está estável no chão antes de o utilizar.

- ♥ Não pendure NADA no seu produto. Isso pode desequilibrá-lo e fazer com que caia.
- ♥ Em caso de inatividade prolongada, mande verificar o seu aparelho pelo seu revendedor especializado.
- ♥ O produto destina-se a utilização em interiores e não deve ser guardado no exterior.
- ♥ Tenha muito cuidado para evitar que os dedos fiquem presos.
- ♥ Verifique o produto antes de o utilizar; em caso de dúvida, não o utilize e peça aconselhamento ao seu revendedor especializado.
- ♥ Utilize o produto apenas em piso horizontal e estável.
- ♥ Em caso de falta de equilíbrio, peça ajuda a uma terceira pessoa.
- ♥ Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser notificado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontra estabelecido.

2. Destino de utilização, indicações e contra-indicações

Destino do produto:

A estrutura de segurança amovível facilita o acesso à banheira a pessoas com dificuldades em levantar-se ou em manter-se de pé. Facilita assim a entrada e a saída da banheira.

Indicações:

- Bloqueio parcial ou total da mobilidade da coluna vertebral ou das articulações do joelho e da anca.
- Redução da capacidade de se levantar ou sentar, dificultando o acesso à banheira

Contra-indicações:

Não utilize este produto em caso de:

- distúrbios cognitivos - distúrbios graves do equilíbrio
- Impossibilidade de se sentar ou de permanecer sentado

3. Instalação

A colocação em funcionamento deste produto só deve ser realizada por pessoal qualificado. Não hesite em consultar o seu revendedor em caso de dúvida.

- 1- Desembale os diferentes componentes contidos na caixa e verifique se estão em bom estado. Em caso de dúvida, não monte o produto. Os diferentes elementos estão descritos na foto (C).
- 2- Encaixe o pé [1] no degrau [3] conforme a foto (A). Pode posicionar o degrau à direita ou à esquerda.
- 3- Posicione a alça de aperto [2] logo acima da borda da banheira, deslizando-a ao longo dos pés [1] conforme a foto (B). Atenção! Risco de ferimentos! Os pés devem estar estáveis no chão e o parafuso de aperto posicionado corretamente o mais próximo possível da borda da banheira para obter o aperto máximo. Não posicione a alça contra a banheira, risco de riscos.
- 4- Aperte a alça de aperto [2] contra a banheira para garantir a estabilidade do conjunto, conforme a foto (D).
- 5- Verifique a estabilidade do produto antes de o utilizar.

4. Manutenção

O produto deve ser limpo regularmente com um pano limpo e seco e um produto de limpeza doméstico não abrasivo.

5. Materiais

O produto é composto por uma estrutura em aço revestida com tinta epóxi e ripas de madeira.

6. Tratamento de resíduos

Por favor, elimine este produto em conformidade com a regulamentação em vigor.

7. Características técnicas

Este produto tem uma garantia de 2 anos, a partir da data de compra, contra qualquer defeito de fabrico. Este produto é biocompatível.

Duração de utilização: 2 anos.