

Finalidade: As bengalas, canadianas e suportes semelhantes são ajudas destinadas a proporcionar apoio ao utilizador, a fim de auxiliar a marcha quando é necessário um suporte adicional para se deslocar.

Características: Estrutura em alumínio e termoplástico. Peso: 570kg. Capacidade de carga: 130kg

Lote: Ver embalagem

Cor:

Turquesa

Pistácio

Azul

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo:

816120.B

816120.T

816120.P

Marca: Forta

Dimensões:

Altura da pega ajustável em 9 posições, de 45 a 69 cm.

Altura do apoio para o braço ajustável em 5 posições, de 19,5 a 25,5 cm.

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)

Fabricante: FORTA - FABRICACIONES ORTOPÉDICAS ALBACETE, S.L.

Morada do fabricante: Pq. Emp. Campollano, c/C 90 Nave 1 - 02007 Albacete Espanha - Spain

Apartado de Correios 5316 - www.fortasl.es

Distribuidor Europeu: Identités

Morada do Distribuidor Europeu: ZA Pôle, 49

Boulevard de la Chanterie, 49124, Saint-Barthélemy-d'Anjou, FRANÇA

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior

2040-357 Rio Maior - geral@gerimais.com

Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar o produto com água morna e um pano macio, evitando o uso de abrasivos, detergentes ou solventes, e seque-o com um pano limpo, macio e seco; não utilize agentes de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois podem danificar materiais como alumínio e poliamida. Para armazenamento, mantenha o produto afastado de fontes de calor, frio extremo, luz solar direta, chamas ou faíscas, guardando-o em local seco e com temperatura amena, protegido contra pó e corrosão. Assegure que todas as peças ou componentes removidos sejam mantidos juntos para evitar perdas, e que todos os elementos sejam armazenados sem qualquer peso sobre eles, não colocando objetos pesados sobre o produto ou suas partes.

Instruções de Utilização: Para regular a altura, primeiro retire o clipe de regulação, depois deslize o tubo interior até à altura desejada, alinhando os orifícios dos tubos, e em seguida volte a colocar o clipe de regulação para fixar a altura.

Antes de utilizar o produto, certifique-se de que os cliques de regulação estão fixos e corretamente posicionados, conforme ilustrado na imagem acima.

A muleta deve ser colocada no braço oposto à perna lesionada.

Certifique-se de que a muleta está regulada em altura de modo a que os seus ombros não fiquem encolhidos. A altura correta é aquela em que pode ficar completamente ereto.

Imagens do Artigo:

