

**Finalidade:** Órtese estabilizadora de joelho destinada a proporcionar suporte, estabilização e proteção da articulação do joelho em casos de lesões ligamentares, instabilidade articular, artrose e processos de reabilitação pós-traumática ou pós-operatória. Promove estabilização medial-lateral, controlo da hiperextensão, compressão e micromassagem em redor da rótula, estimulação e melhora da propriocepção.

**Características:** Feita em tecido elástico 3D e respirável. Possui duas articulações policêntricas com batente de extensão, e tiras para ajuste. Área poplíteia livre o que confere conforto durante a flexão. da propriocepção.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento (UE) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** RD558

**Marca:** Ottec EMO

**Dimensões:** Disponível nos tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

**Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)** Regulamento (UE) 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:** Camino de La Pascualeta, 40 - 46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com – Tel. 243 050 100.

**Manutenção e armazenamento:** Lavar à mão com água morna, no máximo a 30 °C, e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça dispuser de velcros, estes devem ser unidos entre si ou mantidos fechados. Secar à temperatura ambiente. Não estender nem passar a ferro a peça. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes pode deteriorar a peça.

**Instruções de Utilização:** Colocar a órtese no joelho, centrando-a corretamente sobre a articulação. Certificar-se de que os reforços laterais ficam alinhados com as laterais do joelho. Ajustar as tiras e os fechos de velcro até que a joelheira fique firme e confortável. Dobrar e esticar o joelho para verificar se é possível movimentá-lo confortavelmente e se a joelheira se mantém na posição correta.

**Imagens do Artigo:**

