

Finalidade: Órtese dinâmica tornozelo-pé destinada a auxiliar a dorsiflexão do pé, controlar desvios em varo e melhorar a marcha em utilizadores com pé equino decorrente de patologias neurológicas ou lesões nervosas, promovendo a mobilidade e a reabilitação funcional.

Características: Fabricada em fibra de carbono termoconformável (TFC), leve e resistente. Possui tirantes elásticos laterais que promovem impulso dinâmico durante a marcha, desde o contacto do calcanhar até ao descolamento da ponta do pé. Design com calcanhar aberto para melhor adaptação ao calçado e maior conforto.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento (UE) 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 060095

Marca: Fillauer

Dimensões: Direito e esquerdo
S (35-38), M (39-43), L (44-48)

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento (UE) 2017/745

Fabricante: Fillauer Europe AB

Morada do fabricante: SE-MF-000002626

Kung Hans Väg 2

S-192 68 Sollentuna - Sverige (Sweden)

Mandatário Europeu: Especialidades Médicas Ortopédicas, SL

Morada do Mandatário Europeu: C/ Camino Pascualeta nº 40 46200 Paiporta (Valencia) SPAIN

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com - Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar a órtese com água morna e sabão neutro ou álcool. O acolchoamento deve ser lavado à mão a uma temperatura máxima de 30 °C e deixado a secar ao ar, sobre uma superfície plana. Não utilizar fontes de calor diretas para a secagem.

Instruções de Utilização: Retirar a palmilha do calçado e colocar a órtese no interior do sapato, por baixo da palmilha. Introduzir o pé no calçado, posicionar corretamente a banda na perna e apertar os atacadores de forma firme para garantir a estabilidade da órtese durante a marcha. Verificar se a órtese se mantém bem posicionada antes de iniciar a utilização.

Imagens do Artigo:

