

Finalidade: Concebido para aspirar fluidos corporais em adultos e crianças. É adequado para a aspiração nasal, oral e traqueal, de muco, catarro ou sangue, após pequenas cirurgias e adequado para emergências e para uso em veículos de emergência, para aspiração de líquidos como muco e catarro

Características: Construída com um corpo de plástico com elevado isolamento térmico e eléctrico em conformidade com os regulamentos europeus de segurança, a unidade é fornecida com um recipiente de sucção completo em policarbonato esterilizável, com uma válvula de transbordo e está equipada com um regulador de sucção e um medidor de vácuo no painel frontal. Com luz de emergência LED no painel.

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo

Cor: Branco e Azul

Modelo: LTA420

Caixa: 1 Unidade

Dimensões: 380 x 135 x 260 mm

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Dispositivo médico - Classe IIb e III;

Marca: 3A Health Care

Fabricante: 3A Health Care S.r.l.

Morada do Fabricante: Via M. Cerutti Lonato (BS) – Italy

Distribuidor europeu: Moretti S.p.A

Morada distribuidor europeu: CAMI srl - Via Ugo la Malfa, 13 - 43010 Pilastro (PR) – Italy;

Distribuidor: Gerimais Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção: Após a utilização: desligar o equipamento, esvaziar o recipiente coletor, limpar e desinfetar os componentes reutilizáveis. A cânula, o regulador manual e o filtro antibacteriano são descartáveis e devem ser substituídos após cada utilização. Para limpar as partes externas do dispositivo use sempre um tecido de algodão humedecido com detergente. Não aplique detergentes abrasivos ou solventes.

Instruções de Utilização: Antes de utilizar certifique-se de que todos os acessórios estão limpos e desinfetados. Verifique se o recipiente, tubos e filtro antibacteriano estão corretamente montados. Antes da primeira utilização, carregue totalmente a bateria (aprox. 4 horas). A autonomia é de cerca de 40–45 minutos em potência máxima. Ligue o aparelho no botão ON/OFF. Ajuste o nível de aspiração através do regulador de vácuo conforme a necessidade clínica. Mantenha sempre o aparelho e o recipiente na posição vertical durante o funcionamento.

Imagens do Artigo:

