

Silicoplant

Ortesis de gel viscoelástico

Viscoelastic gel orthoses
Orthèse en gel viscoélastique
Orthese aus viskoelastischem gel
Ortesi in gel viscoelastico
Ortese de gel viscoelástico



EMO
especialista
en ortopedia



PG112

**Dedil protector
de gel cubierto de
tejido elástico**

Protective gel digital
cap covered with elastic fabric



✂ TALLAS SIZES **S 15mm L 20mm**

MADE IN SPAIN



EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40. 46200 Paiporta (Valencia) Spain
emo@emo.es | www.emo.es | +34 963 132 051

Silicoplant
Ortesis de gel viscoelástico

Viscoelastic gel orthoses

PG112 Dedil protector de gel cubierto de tejido elástico

CARACTERÍSTICAS: Dedil forrado con gel que ofrece protección contra lesiones en la superficie del dedo del pie, especialmente en el área de las uñas. Longitud de 60 mm. Lavable y reutilizable. 1 unidad.

INDICACIONES: Protección en lesiones de la superficie del dedo del pie. Callosidades interdigitales (ojos de gallo o helomas). Dedos en martillo, dedos superpuestos o infrapuestos. Lesiones queratósicas. Dedos parcialmente amputados. Problemas cutáneos o ungulares debidos a sequedad. Uñas encamadas.

EFFECTOS: Alivia la presión y la fricción entre los dedos. Protección para dedos parcialmente amputados. Protege. Hidrata.

LAVADO Y MANTENIMIENTO: Lavar con agua fría, jabón neutro y dejar secar ala aire. Espolvorear ligeramente con talco. Guardar la temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen.

COLOCACIÓN: La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. Colocar la ortesis según está colocada en la imagen de la lámina de presentación.

NORMATIVA: Este producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO14971) minimizando todos los riesgos existentes. Producto sanitario Clase I, no estéril, sin función de medición.

PRECAUCIONES: Si se produjese alguna reacción alérgica, irritación, alteración cutánea, hinchazón o padece cualquier tipo de sensibilización retirar el producto y consultar con el médico prescriptor o profesional sanitario. No utilizar directamente sobre cicatrices abiertas o enrojecidas sin estar debidamente protegidas.No exponer a una llama o fuente de calor a temperaturas muy elevadas. La ortesis tiene que quedar ajustada pero no debe comprimir en exceso. Inspeccionar el ajuste del producto para asegurarse de que se ajusta correctamente. No apriete demasiado. Comprobar regularmente que la circulación no se vea comprometida. En caso de duda en la elección de la talla, elegir siempre la talla mayor.El usuario debe examinar regularmente el producto para que se encuentre en perfecto estado y garantizar su correcto funcionamiento. No utilice el producto si está dañado.

ADVERTENCIAS: La utilización de la ortesis está condicionada a las indicaciones. Se recomienda utilizar la ortesis por un solo paciente. Para la correcta colocación de la ortesis siga las

indicaciones del fabricante. Siga las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del profesional sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. El especialista se encargará de proporcionar la información necesaria para asegurar que el usuario final o la persona responsable de la colocación del producto entiende cómo utilizar el producto de manera segura. Producto no apto para su esterilización. Mantener fuera del alcance de los niños.Par la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material de éste, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país.Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

PG112 Proteção para dedos dos pés em gel revestida com tecido elástico

CARACTERÍSTICAS: Proteção para dedos dos pés revestida com gel que oferece proteção contra lesões na superfície dos dedos, especialmente na área das unhas. Comprimento 60 mm. Lavável e reutilizável. 1 unidade.

INDICAÇÕES: Proteção contra lesões na superfície do dedo do pé. Calos interdigitais (calos ou helomas). Dedos em martelo, dedos sobrepostos ou dedos subpostos. Lesões queratóticas. Dedos parcialmente amputados. Problemas de pele ou unhas devido à secura. Unhas encravadas.

EFEITOS: Alivia a pressão e a fricção entre os dedos dos pés.

Proteção para dedos parcialmente amputados. Protege. Hidrata.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO: Lavar com água fria e sabão neutro. Deixar secar ao ar. Polvilhar levemente com talco. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original

COLOCAÇÃO: Escolher o tamanho certo é essencial para obter a máxima eficácia do tratamento e prolongar a vida útil da órtese. Coloque a órtese conforme mostrado na imagem na embalagem.

REGULAMENTAÇÃO: Este dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos dispositivos médicos e com os respetivos regulamentos nacionais. Foi realizada uma análise de risco (UNE EN ISO14971) minimizando todos os riscos existentes. Dispositivo médico Classe I, não esterilizado, sem função de medição.

PRECAUÇÕES: Se ocorrer qualquer reação alérgica, irritação, alteração cutânea, inchaço ou qualquer tipo de dessensibilização, retire o produto e consulte o seu médico ou profissional de saúde. Não utilize diretamente em cicatrizes abertas ou com secreção sem proteção adequada. Não exponha a fontes de calor a temperaturas muito elevadas. A órtese deve ser ajustada, mas não comprimida excessivamente. Verifique o ajuste do produto para garantir que se encaixa corretamente. Não aperte demasiado. Verifique regularmente (1. A circulação sanguínea não deve ser comprometida. Em caso de dúvida quanto ao tamanho, escolha sempre o tamanho maior. O utilizador deve examinar regularmente o produto para garantir que está em perfeitas condições e a funcionar corretamente. Não utilize o produto se estiver danificado.

ADVERTÊNCIAS: A utilização da órtese está sujeita às seguintes indicações. Recomenda-se que a órtese seja utilizada por um único paciente. Para o ajuste correto da órtese, siga

as instruções do fabricante. Siga as instruções ou recomendações do profissional de saúde que prescreveu o produto. Para um ajuste personalizado, consulte um especialista. O especialista fornecerá as informações necessárias para garantir que o utilizador final ou a pessoa responsável pelo ajuste do produto compreenda como usar o produto com segurança. Produto não adequado para esterilização. Mantenha fora do alcance das crianças. Para descartar o produto, use o recipiente de resíduos sólidos. Para descartar a embalagem, dependendo do material de que é feito, use o recipiente de papel/cartão ou o recipiente de plástico. Em todos os casos, cumpra rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado ao produto deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o usuário e/ou paciente estão estabelecidos.

Fecha última revisión 5/2024 V.01 Last revision date 5/ 2024 V.01



FABRICANTE
MANUFACTURER



CONSULTAR INSTRUCCIONES
CONSULT INSTRUCTIONS



FECHA DE FABRICACIÓN
DATE OF MANUFACTURE



CÓDIGO DE LOTE
BATCH CODE



PRODUCTO SANITARIO
MEDICAL DEVICE



NÚMERO DE REFERENCIA
REFERENCE NUMBER



CADUCIDAD
EXPIRATION



CONFORMIDAD CE
CE CONFORMITY



MANTENER SECO
KEEP DRY



UN PACIENTE. MÚLTIPLES USOS.
SINGLE PATIENT. MULTIPLE USES.



RECICLADO
RECYCLED



NO CONTIENE LÁTEX
DOES NOT CONTAIN LATEX



PUNTO VERDE
GREEN POINT



MANTENER ALEJADO DE LA LUZ
KEEP AWAY FROM LIGHT

