

Finalidade: A grade de apoio para cama dobrável foi desenvolvida para proporcionar maior segurança e estabilidade durante a entrada e saída da cama, auxiliando pessoas com mobilidade reduzida, idosos, gestantes e indivíduos em processo de recuperação. A sua estrutura oferece um ponto de apoio firme, contribuindo para a redução do risco de quedas e promovendo maior autonomia nas atividades diárias.

Características: Compatível com camas de base de ripas e bases estofadas. Estrutura dobrável. Ideal para utilização em viagens. Instalação simples entre a base da cama e o colchão, proporcionando uma fixação firme e estável. Altura ajustável para melhor adaptação ao utilizador.

Lote: Ver embalagem

Cor:

Data de produção: Ver embalagem

Modelo: 815028

Marca: IDENTITÉS

Dimensões: Dimensões da base de apoio: 70 × 58 cm. Dimensões da pega de apoio: 12 cm (largura) × 53 cm (altura).

Capacidade máxima de carga: 127 kg.

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pôle 49

Boulevard de la Chanterie 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou - FRANÇA - customerservice@identities.tm.fr

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Botão Pereira, 15, Zona Industrial de Rio Maior – 2040-357 Rio Maior – qualidade@gerimais.com - Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar regularmente com um pano macio e seco ou ligeiramente humedecido. Não utilizar produtos de limpeza abrasivos ou solventes. Antes de cada utilização, verificar se a estrutura apresenta danos, desgaste ou folgas nos parafusos e mecanismos de fixação. Em caso de danos ou defeitos, interromper imediatamente a utilização e contactar o fornecedor. Quando não estiver em uso, dobrar a estrutura para facilitar o armazenamento e guardar em local limpo, seco e protegido da humidade.

Instruções de Utilização: Desdobre a estrutura da grade e fixe-a corretamente utilizando os parafusos fornecidos, ajustando a altura conforme necessário. Em seguida, coloque a base da grade entre a base da cama e o colchão, mantendo uma distância mínima de 25 cm da cabeceira. Certifique-se de que a grade está firme e estável antes de cada utilização e utilize-a exclusivamente como apoio para entrar e sair da cama, respeitando a capacidade máxima de 127 kg

Imagens do Artigo:

