

Grade de apoio para cama dobrável

Ref. 815028




Essa grade para cama é indicada principalmente para idosos ou gestantes, garantindo suporte seguro para entrar e sair da cama com facilidade.

Atenção:

1. Peso máximo suportado: limite de 150kg. Não ultrapasse esse peso para evitar riscos ao usuário.
2. Verifique cuidadosamente se há danos ou falhas e leia o manual atentamente antes de utilizar o apoio de cama. Caso note algum defeito ou dano, não use e entre em contato com seu fornecedor imediatamente.
3. Não utilize sem colchão ou se o colchão tiver menos de 5 cm de espessura.
4. Limpe regularmente com pano macio e evite produtos de limpeza abrasivos.

Instruções de montagem:


Passo 1: retire a parte traseira da cama da caixa e abra o suporte até formar um ângulo de 90° para deixá-lo na posição vertical

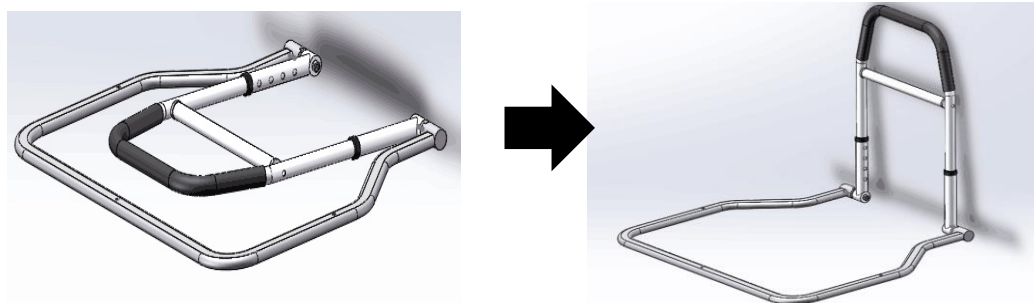

Passo 2: Encaixe o parafuso tipo C nos dois furos laterais conforme mostra a imagem abaixo



Passo 3 : Aperte os dois parafusos. Puxe a alavanca do parafuso e gire-a até que fique na posição vertical.

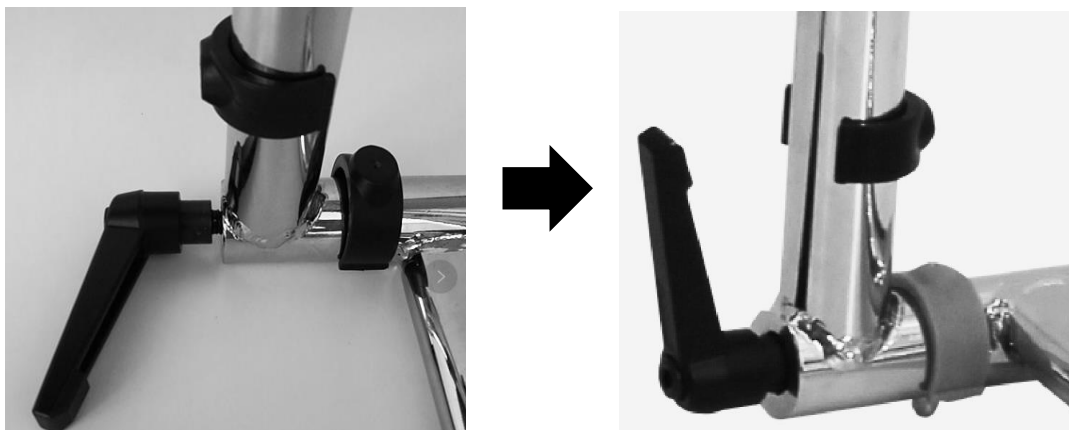

Passo 4 : Ajuste a altura. Retire os dois parafusos tipo C até atingir o nível desejado.

Passo 5 : Levante o colchão, posicione a base da grade de proteção sob o colchão, deixando pelo menos 25cm de distância da cabeceira, depois abaixe o colchão. Verifique se a grade está firme e segura antes de utilizar



Dobrar: Afrouxe os dois parafusos e retire os dois parafusos tipo C.

Distribuído por :

Identités

Boulevard de la Chanterie

F-49124 Saint Barthélémy d'Anjou

França