

Finalidade: Órtese destinada à correção, alinhamento e estabilização dos dedos do pé, indicada para auxiliar no tratamento conservador e pós-cirúrgico de deformidades e desalinhamentos articulares. Promove a manutenção do correto posicionamento dos dedos, contribuindo para a sua imobilização, alinhamento e recuperação funcional durante o período de utilização, especialmente em uso noturno.

Características: Faixa metatarsal elástica com revestimento interno em silicone para maior fixação. Três faixas falangeais macias e não elásticas. Faixa falangeal específica para o hálux. Faixa elástica para estabilização no calcanhar. Fechos em velcro. Uso noturno. Sem látex.

Lote: Ver embalagem

Cor: Bege

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: BAN50

Marca: Emo

Dimensões: Tamanho único. Metatarso de 30 cm de comprimento. Largura da banda metatarso 8 cm. Modelo bilateral (pé direito e esquerdo).

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento UE 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante: Camino Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) – www.emo.es

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com - Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Lavar à mão com água morna (máx. 30 °C) e sabão neutro, deixando secar ao ar. Não utilizar lixívia, máquina de secar nem passar a ferro. Manter os fechos de velcro fechados durante a lavagem. Evitar a exposição direta a fontes de calor e garantir que a órtese está completamente seca antes de guardar ou reutilizar. Evitar o contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes. Armazenar à temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Instruções de Utilização: Posicionar a faixa metatarsal no antepé, ajustar a faixa elástica ao redor do calcanhar para estabilização e fixar as faixas falangeais nos dedos a tratar, alinhando-os na posição pretendida. Regular os fechos em velcro de forma a garantir uma fixação firme, mas confortável, sem comprometer a circulação. Utilizar preferencialmente durante a noite ou conforme indicação do profissional de saúde.

Imagens do Artigo:

