

**Finalidade:** Órtese corretiva noturna destinada ao alinhamento gradual do hálux valgo (joanete), auxiliando no tratamento conservador e na recuperação pós-operatória através da correção da posição do dedo grande do pé.

**Características:** Tala com formato anatómico. Almofada de proteção para o dedo grande do pé. Almofada de conforto sobre o 5.º metatarsiano. Faixa metatársica ajustável para controlo da pressão corretiva. Faixa anatómica retrocapital sobre o 1.º metatarsiano. Estrutura em termoplástico revestida com velour macio. Fecho em microvelcro para ajuste individual.

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva** Regulamento UE 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** HV200 DRT S-M

HV200 DRT L-XL

HV200 ESQ S-M

HV200 ESQ L-XL

**Marca:** EMO

**Dimensões:** Lado Esquerdo - Direito

TAMANHO DO CALÇADO P/2 (35-40), G-GG/3 (40-45)

**Certificado CE:** (ou Declaração de Conformidade)  
Regulamento UE 2017/745

**Fabricante:** ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.

**Morada do fabricante:** Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40 - 46200 Paiporta (Valencia) España - [www.emo.es](http://www.emo.es)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda.

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com) - Tel. 243 050 100

**Instruções de Utilização:** Abrir totalmente a órtese, posicionar o dedo grande na zona acolchoada, ajustar a faixa do 1.º metatarsiano atrás do joanete e, em seguida, regular a faixa do 5.º metatarsiano até obter uma correção confortável e tolerável. Utilizar durante o período noturno conforme orientação do profissional de saúde.

**Manutenção e armazenamento:** Lavar manualmente com água morna (máx. 30 °C) e sabão neutro. Manter os fechos de velcro fechados durante a lavagem. Secar à temperatura ambiente, sem utilizar máquina de secar, ferro de engomar ou exposição direta a fontes de calor. Não utilizar lixívia nem limpeza a seco e evitar o contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes. Armazenar à temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original, em local limpo e seco.

**Imagens do Artigo:**

