

Finalidade: Proporcionar suporte e compressão abdominal, promovendo calor terapêutico e melhoria da propriocepção. Indicado como suporte na reabilitação postural, em casos de lombalgia leve e hipotonia muscular.

Características: Órtese abdominal em neopreno, com zona ampla de fecho e ajuste por velcro. Proporciona compressão, calor terapêutico e melhoria da propriocepção. Apresenta fácil colocação e boa adaptação ao corpo.

Lote: Ver embalagem

Cor: Preto

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: FJ10A

Marca: NeoActiv by EMO

Dimensões: Tamanho único, para perímetro abdominal de 72 a 120 cm

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento UE 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante: Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40 - 46200 Paiporta (Valencia) España - www.emo.es

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior

2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com

Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Lavar à mão em água morna com detergente neutro, mantendo os velcros fechados. Não utilizar lixívia, álcool ou solventes. Deixar secar ao ar e não passar a ferro. Armazenar o produto limpo e seco.

Instruções de Utilização: Colocar a órtese abdominal sobre a zona a tratar e ajustar o fecho de velcro até obter uma adaptação confortável e uma compressão adequada, sem restringir os movimentos. Seguir as recomendações do profissional de saúde para a correta colocação e utilização.

Imagens do Artigo:

