



BENGALA DOBRÁVEL DE DESIGN
BENGALA DOBRÁVEL DE CAMINHADA
Manual de instruções - DISPOSITIVO
MÉDICO

REF. 816014 – 816068 – 816069A - 816069B - 816069D - 816069FL –
816069LE – 816069OR



SÍMBOLOS PRESENTES NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES
SIMBOLI PRESENTI SUL L'ETICHETTA O NEL MANUALE D'USO
SYMBOLS AUF DEM ETIKETT ODER IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG
SYMBOLEN OP HET ETIKET OF IN DE GEBRUIKSAANWIJZING
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ Ή ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
SYMBOLA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA ETYKIECIE LUB W INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

	Endereço do fabricante Indirizzo del fabbricante Adresse des herstellere Adres van de fabrikant Διεύθυνση του κατασκευαστή Adres producenta		Convite para ler o manual de instruções Invito a leggere il manuale d'uso Aufforderung zur Leseanleitung Uitnodiging om de gebruiksaanwijzing te lezen Πρόσκληση για ανάγνωση των οδηγιών χρήσης Zaproszenie do przeczytania instrukcji użytkowania
	Data de fabricação Data di fabbricazione Herstellungsdatum Productiedatum Ημερομηνία κατασκευής Data produkcji		Respeitar as instruções de segurança Rispettare le istruzioni di sicurezza Sicherheitsanweisungen beachten De veiligheidsvoorschriften naleven Τήρηση των οδηγιών ασφαλείας Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
	Número do lote Numero di lotto Chargennummer Partijnummer Αριθμός παρτίδας Numer partii		Conformidade CE Conformità CE CE-Konformität CE-conformiteit Συμμόρφωση CE Zgodność CE
	Referência do produto Riferimento del prodotto Produktreferenz Productreferentie Αναφορά προϊόντος Numer referencyjny produktu		Teme a umidade Teme l'umidità Fürchtet die Feuchtigkeit Vreest vochtigheid Φοβάται την υγρασία Boi się wilgoci
	Peso máximo do utilizador Peso massimo dell'utente Maximales Benutzergewicht Maximaal gebruikersgewicht Μέγιστο βάρος χρήστη Maksymalna waga użytkownika		Dispositivo médico Dispositivo medico Medizinprodukt Medisch hulpmiddel Ιατρική συσκευή Wyrób medyczny



ATENÇÃO

Leia atentamente o manual antes de utilizar este produto e conserve-o para referência futura, se necessário.


Usuário: Se você não conseguir ler ou entender os avisos, precauções ou instruções, entre em contato com seu profissional de saúde ou distribuidor antes de usar este produto, pois o uso inadequado pode causar riscos e danos físicos. Consulte seu médico ou especialista em saúde antes de utilizar um dispositivo de auxílio técnico. Ele poderá aconselhá-lo e informá-lo sobre a utilização mais adequada ao seu caso.

Distribuidor: Este manual deve ser entregue aos usuários deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

As bengalas dobráveis são dispositivos de auxílio à marcha destinados a pessoas com mobilidade reduzida. As bengalas são dobráveis, feitas de alumínio e fáceis de transportar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

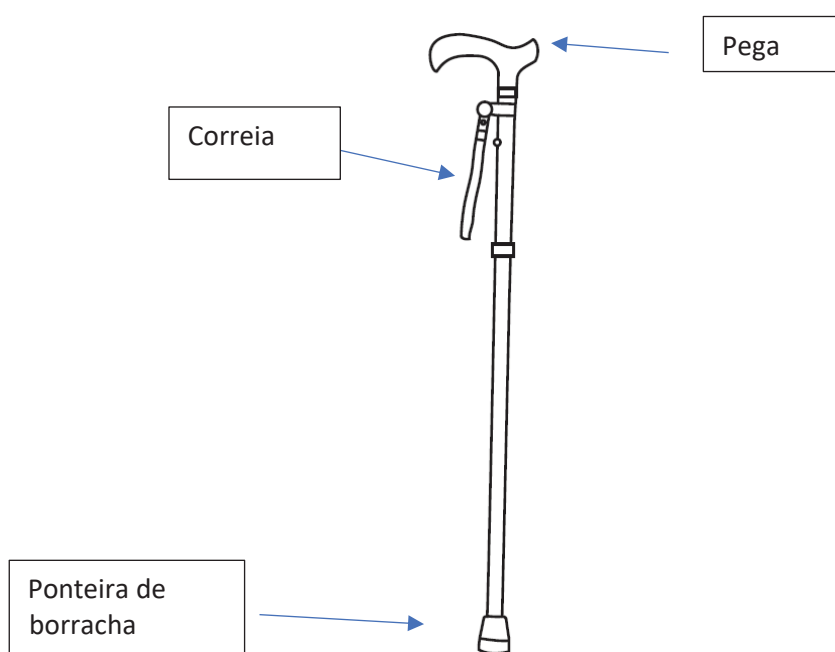

PRECAUÇÕES DE USO



O não cumprimento das precauções de uso pode causar riscos de lesões graves.

- Não ultrapasse o limite máximo de peso de 110 kg.
- Utilize apenas os acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- Verifique visualmente o estado geral do produto (tubo, pega, correia, ponteira).
- Certifique-se de que os cliques de ajuste de altura estão bem encaixados antes de cada utilização e que o parafuso antirruído está bem apertado.
- Garanta que todas as peças estão bem fixadas e em boas condições de funcionamento.
- Não faça nenhum ajuste no produto enquanto ele estiver em uso.
- Sempre apoie-se utilizando a pega.
- Em caso de peças danificadas, partidas ou gastas, entre em contato com o revendedor.

MONTAGEM E UTILIZAÇÃO

MONTAGEM

1. Para montar a bengala, deixe os 3 fechos inferiores encaixarem nos orifícios e junte as 4 partes.
2. Para dobrar a bengala, pressione os 3 fechos inferiores e puxe as 4 partes para separá-las e dobrá-las. Os fechos podem estar um pouco rígidos, o que evita que a bengala se dobre involuntariamente.
3. Para ajustar a altura, pressione o fecho superior, puxe ou empurre o punho até uma das 5 alturas desejadas e deixe o fecho encaixar novamente no orifício correspondente.

UTILIZAÇÃO

Para utilizar o produto, apoie-se no punho. Ajuste a altura, se necessário. Avance lentamente.

MANUTENÇÃO - CUIDADOS



A falta de manutenção e cuidados com o produto pode causar riscos de ferimentos graves.

- Limpar regularmente o produto com água morna e um pano macio. Não utilizar produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Secar com um pano limpo, macio e seco para evitar oxidação.
- Certificar-se de que não haja acúmulo de sujeira ou detritos ao redor das ponteiros.
- Não utilizar produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois podem danificar os materiais de alumínio e poliamida.
- Verificar periodicamente o desgaste e a firmeza de todas as fixações, do punho e da base de borracha.
- Verificar antes de cada uso se a ponteira de borracha está em bom estado.
- Verificar antes de cada uso se os cliques estão bem encaixados para o ajuste de altura e se o parafuso anti-ruído está bem apertado.
- Em caso de mau funcionamento, não tente consertar o produto sozinho. Consulte um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO

O produto pode ser reutilizado, mas deve ser previamente limpo e desinfetado, respeitando as normas de higiene. Ao transferir o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo usuário. Antes disso, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto não puder mais ser utilizado e precisar ser descartado, entre em contato com o revendedor especializado. Se desejar realizar o descarte por conta própria, consulte a empresa local de gestão de resíduos para obter as diretrizes corretas de eliminação.

ARMAZENAMENTO



O não cumprimento das condições de armazenamento pode causar a deterioração do produto e, conseqüentemente, riscos de ferimentos graves.

Não armazene o seu produto por um período prolongado próximo a uma fonte de calor ou exposto ao sol (ex: atrás de uma janela ou próximo a um radiador) ou perto de uma fonte de frio.

Mantenha-o afastado de chamas e fontes de faíscas.

Siga corretamente as condições de armazenamento do produto:

- Em local seco e com temperatura amena
- Proteja o produto com uma embalagem contra poeira e corrosão (ex: elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salino)
- Armazene todas as peças removidas juntas, no mesmo local (ou identifique-as, se necessário) para evitar confusão com outras peças durante a remontagem
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não colocar objetos pesados sobre os

elementos do produto, não prender nada sobre eles etc.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões totais	Comprimento: 83,5 a 95,5 cm em 5 posições
Peso	0,37 kg
Carga máxima	110 kg

DURAÇÃO DE USO

A vida útil prevista deste produto é de 5 anos, desde que utilizado em condições normais de uso, segurança e manutenção. Após esse período, o produto pode continuar sendo utilizado, desde que permaneça em boas condições.

GARANTIA

Este produto possui uma garantia de 2 anos a partir da data de compra pelo usuário. A IDENTITÉS fornecerá peças de reposição para qualquer componente quebrado devido a um defeito de fabricação, design ou material. Caso precise acionar a garantia, entre em contato com o distribuidor onde adquiriu o produto. Falhas decorrentes de danos acidentais, uso indevido, modificações ou desgaste natural não estão cobertas pela garantia. Para qualquer solicitação de garantia, entre em contato com o revendedor onde o produto foi comprado.



Identités – ZA Pole 49
Bd de la Chanterie
49124 Saint Barthélemy d'ANJOU



Peso máximo permitido: 110 kg
Peso massimo consentito: 110 kg
Zulässiges Höchstgewicht: 110 kg
Maximaal toegestaan gewicht: 110 kg
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος: 110 κιλά
Maksymalna dozwolona waga: 110 kg

