

Finalidade: Órtese destinada à fixação, estabilização, imobilização, proteção e alinhamento dos dedos das mãos e dos pés, indicada em situações como entorses, traumatismos dolorosos, deformidades dos dedos e fraturas estáveis e não deslocadas.

Características: Fabricada em material têxtil laminado, suave e confortável, composta por uma cinta com presilha para fixação de um dedo sobre o outro. Possui lâmina interior antiderrapante, fecho e ajuste por microvelcro, espessura reduzida para facilitar a utilização com diferentes tipos de calçado e não contém látex.

Lote: Ver embalagem

Cor: Bege

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: BAN20

Marca: EMO

Dimensões: Comprimento de 2 cm e embalagem com 5 unidades.

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade) Regulamento UE 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, S.L.

Morada do fabricante: Camino Pascualeta nº 40 46200 Paiporta (Valencia) SPAIN

www.emo.es

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior - 2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Lavar à mão em água morna, até 30 °C, com sabão neutro, e deixar secar ao ar. Manter o velcro fechado durante a lavagem. Não expor a fontes diretas de calor, superfícies quentes ou luz solar direta. Evitar o contacto com pomadas, cremes, álcool e solventes. Armazenar à temperatura ambiente, preferencialmente na embalagem original.

Instruções de Utilização: Introduzir o dedo lesionado no espaço da órtese e envolver a extremidade da cinta à volta do dedo adjacente, fixando-a com o fecho de microvelcro. Ajustar de forma a manter o dedo estabilizado e alinhado, sem causar desconforto ou limitar excessivamente os movimentos. Verificar regularmente se a órtese está corretamente posicionada e em boas condições de utilização.

Imagens do Artigo:

