

Vendaje de dedos 20

Finger bandage
Pansement au doigt
Fingerverband
Bendaggio per le dita
Bandagem de dedo



EMO
especialistas
en ortopedia



BAN20
Longitud 2 cm.



APTO PARA SU USO EN MANOS Y PIES

UNIDADES
5
UNITS



EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40. 46200 Paiporta (Valencia) Spain
emo@emo.es | www.emo.es | +34 963 132 051

BAN20 Longitud 2 cm.

Vendaje de dedos 20

Vendaje de dedos 20

BAN20 Longitud 2 cm.

CARACTERÍSTICAS Ortesis fabricada con un suave y cómodo material textil laminado. Consiste en una cinta con un bucle en el extremo que permite fijar un dedo sobre otro. Su mínimo espesor facilita su colocación con cualquier tipo de calzado. Incorpora lámina interior antideslizante. Cierre y ajuste mediante microvelcro. Libre de látex. Longitud 2 cm.

EFFECTOS Sujeción. Estabilización. Inmovilización. Protección. Alineación de las articulaciones lesionadas de los dedos de las manos y pies.

INDICACIONES Esguince de dedos. Procesos dolorosos por traumatismo. Tratamiento de articulaciones interfalángicas distales y proximales. Fractura de dedos estable y no desplazada.

NORMATIVA Este producto sanitario cumple el Reglamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Se ha realizado un Análisis de Riesgos (UNE EN ISO14971) minimizando todos los riesgos existentes. Producto sanitario Clase I no estéril, sin función de medición.

MATERIALES Exterior: Poliamida; 100% Interior: Poliuretano; 100%.

COLOCACIÓN La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento, así como prolongar la vida útil de la ortesis. Introducir el dedo lesionado en el bucle que forma la ortesis. Posteriormente rodear con el extremo de la cinta el dedo sobre el que se va a fijar la ortesis y cerrar mediante velcro. El usuario debe examinar regularmente el producto para que se encuentre en perfecto estado y garantizar su correcto funcionamiento. La ortesis debe adaptarse a la zona afectada sin producir molestias o incomodidades durante su uso.

PRECAUCIONES Si se produjese alguna reacción alérgica, irritación, alteración cutánea, hinchazón o padeciese cualquier tipo de sensibilización retirar el producto y consultar con el médico prescriptor o profesional sanitario. No utilizar directamente sobre cicatrices abiertas o enrojecidas sin estar debidamente protegidas. No exponer a una llama o fuente de calor a temperaturas muy elevadas.

ADVERTENCIAS La utilización de la ortesis está condicionada a las indicaciones. Para la correcta colocación de la ortesis siga las indicaciones del fabricante. Siga las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del profesional sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. El especialista se encargará de proporcionar la información necesaria para asegurar que el usuario final o la persona responsable de la colocación del producto entiende cómo utilizar el producto de manera segura. Producto no apto para su esterilización. Mantener fuera del alcance de los niños. Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del envase, dependiendo del material de éste, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico.

En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del

país. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

LAVADO Y MANTENIMIENTO Lavar periódicamente con agua tibia (máximo 30°), jabón neutro y dejar secar al aire. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados sobre la prenda. No exponer a fuentes de calor directas como superficies calientes, exposición directa al sol y otros focos de ignición. El contacto con pomadas, cremas, alcoholes y disolventes puede deteriorar la prenda. Guardar la temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen.

CADUCIDAD 36 meses.

VIDA ÚTIL, CERTIFICADOS DE CALIDAD Y GARANTÍAS En caso de que detecte algún defecto dentro del plazo de garantía, tenga la amabilidad de ponerse en contacto con su distribuidor a fin de solucionar cuanto antes su

problema. La garantía no será válida si el producto ha sido dañado por uso inapropiado, o no se han seguido las instrucciones y recomendaciones de uso. Con un mantenimiento regular, el producto será fiable y duradero y podrá reutilizarse. Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable. Certificado OEKO-Tex Standard 100. Garantía dentro del marco de las disposiciones legales.

Fecha de publicación de la última revisión 03/2022.



FABRICANTE
MANUFACTURER



FECHA DE FABRICACIÓN
DATE OF MANUFACTURE



PRODUCTO SANITARIO
MEDICAL DEVICE



CADUCIDAD
EXPIRATION



MANTENER SECO
KEEP DRY



RECICLADO
RECYCLED



PUNTO VERDE
GREEN POINT



CONSULTAR INSTRUCCIONES
CONSULT INSTRUCTIONS



CÓDIGO DE LOTE
BATCH CODE



NÚMERO DE REFERENCIA
REFERENCE NUMBER



CONFORMIDAD CE
CE CONFORMITY



UN PACIENTE. MÚLTIPLES USOS.
SINGLE PATIENT. MULTIPLE USES.



NO CONTIENE LÁTEX
DOES NOT CONTAIN LATEX



MANTENER ALEJADO DE LA LUZ
KEEP AWAY FROM LIGHT

