

Finalidade: Oxímetro de dedo destinado à medição não invasiva da saturação funcional de oxigénio no sangue (SpO_2) e da frequência de pulso, através do dedo. Indicado para utilização em adultos e crianças, em ambiente domiciliário e clínico.

Características: Medição não invasiva da saturação de oxigénio (SpO_2) e da frequência de pulso (PR). Ecrã digital de fácil leitura. Ligação Bluetooth para transmissão de dados (consoante o modelo). Ativação e desligamento automáticos. Indicador de baixa carga da bateria. Alimentação por 2 pilhas AAA. Compacto, leve e portátil. Adequado para utilização em adultos e crianças. Precisão de medição de SpO_2 de $\pm 2\%$ (70%–100%) e pulsação de ± 2 bpm ou $\pm 2\%$. Proteção IP22 contra poeiras e gotas de água.

Cor: Branco

Caixa: Regulamento (UE): 2017/745

Classificação: Classe IIa;

Modelo: PC-60FW

Dimensão: 4,5cm x 2,5 cm x 2,5 cm

Marca: Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Fabricante: Shenzhen Creative Industry Co., Ltd.

Morada do Fabricante: Piso 5, Ed. 9, Baiwangxin High-Tech Industrial Park, Songbai Road, Xili Street, Nanshan District, 518110 Shenzhen, R.P.

China

Distribuidor: Gerimais

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior

2040-357 Rio Maior - geral@gerimais.com
qualidade@gerimais.com Tel. 243 050 100

Manutenção: Limpe o oxímetro com um pano macio ou toalhete embebido em álcool a 75%, evitando a entrada de líquidos no dispositivo. Substitua as pilhas quando necessário e retire-as se o equipamento não for utilizado durante mais de 7 dias. Armazene em local limpo e seco, entre -20 °C e 60 °C, protegido da humidade, poeiras e impactos.

Instruções de Utilização: Insira as pilhas e verifique a sua correta instalação. Coloque o dedo completamente no sensor do oxímetro, mantendo-o imóvel durante a medição. Aguarde alguns segundos até à apresentação dos valores de saturação de oxigénio (SpO_2) e frequência de pulso (PR) no ecrã. Após a utilização, retire o dedo e o dispositivo desligar-se-á automaticamente.

Imagens do Artigo:

