

Finalidade: Aparelho de apoio ao treino e auxiliar terapêutico destinado a melhorar a mobilidade da coluna vertebral e das articulações, aliviar tensões, relaxar a musculatura próxima à coluna, promover a mobilização vertebral, estimular a circulação e auxiliar em exercícios de equilíbrio, consciência corporal e prevenção de quedas. Pode ser utilizado em treinos gerais e em programas de fisioterapia e reabilitação.

Características: Design compacto e portátil. Fabricado em espuma de poliuretano. Alça de transporte ajustável em poliéster e poliamida. Pode ser fixado a encostos para proporcionar apoio às costas. Permite ajustar a altura de posicionamento através da alça. Adequado para relaxamento muscular, mobilização da coluna e exercícios de equilíbrio. Peso máximo do utilizador: 150 kg. Reutilizável.

Dimensões: aproximadamente 12 × 12 × 6 cm

Cor: Preto

Modelo: 162.304

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Marca: SISSEL

Declaração de conformidade: Regulamento UE 2017/745

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante: Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland (Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com - Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Limpar com um pano macio e uma solução de água e sabão suave. Quando necessário, especialmente na mudança de utilizador, desinfetar com uma solução adequada sem álcool. Não utilizar desinfetantes com substâncias cáusticas, como ácidos ou álcalis, pois podem danificar a superfície. Guardar na posição horizontal, sem dobrar e sem colocar objetos sobre o produto. Manter afastado de fontes de calor, chamas, faíscas e luz solar direta.

Instruções de Utilização:

Antes de cada utilização, verificar o estado e a limpeza do produto. Retirar a correia de transporte antes de utilizar. Aquecer antes do exercício e realizar os exercícios de acordo com as instruções do fabricante ou sob orientação de um profissional. Para utilização no encosto, verificar se este é estável, posicionar o SPINEFITTER Mini na zona inferior a média das costas e fixá-lo firmemente com a correia. Ajustar a altura conforme necessário. Utilizar durante 6–8 minutos e fazer pausas regulares, alterando a altura para trabalhar diferentes zonas da coluna. Em combinação com o SPINEFITTER Trigger Tool, o tempo de aplicação deve ser reduzido para 30 segundos até um máximo de 2 minutos.

Imagens do Artigo:

