

Finalidade: Cadeira de banho Aston oferece funcionalidade, conforto e qualidade para o banho do seu paciente. Pode ser utilizado em versão duche e em versão sanitária graças ao seu equipamento. Possui todos os avanços em termos de manobrabilidade e conforto.

Características: Cadeira de duche/WC com rodas traseiras grandes. Apoios de braços rebatíveis. Apoios de pés rebatíveis, removíveis e ajustáveis em altura e ângulo. Altura da cadeira ajustável. Rodas com sistema de travagem. Assento com abertura sanitária. Balde com tampa, removível. Encosto e assento acolchoados.

Dimensões: 74 × 112 × 99 cm (L × P × A)

Assento: 46 × 43 × 50 cm

Abertura sanitária: 27 × 17 cm.

Peso máximo do utilizador: 160 kg. Peso da cadeira: 16 kg.

Cor: Branco e azul

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação: Classe I

Modelo: 822253

Marca: Aston

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento: Limpar regularmente com pano húmido e desinfetante. Não utilizar produtos abrasivos, detergentes agressivos ou solventes. Secar com pano macio, limpo e seco.. Verificar antes de cada utilização o assento, encosto e travões. Verificar mensalmente as fixações, rodas, apoios de braços e apoios de pés. Em caso de avaria, não reparar por conta própria; contactar um revendedor autorizado. Armazenar em local seco e temperado. Proteger contra poeira, corrosão, areia, água salgada e ar marinho. Manter afastado de fontes de calor, frio, chamas e faíscas. Armazenar as peças desmontadas juntas e devidamente identificadas. Manter todos os componentes sem carga, evitando colocar peso excessivo sobre as peças.

Instruções de utilização: Verificar se todos os componentes estão corretamente fixados antes da utilização. Utilizar a cadeira sobre piso plano e estável.

Acionar os travões das rodas quando a cadeira estiver parada ou durante transferências. Desbloquear os travões antes de deslocar a cadeira. Ajustar a altura da cadeira e dos apoios de pés conforme necessário.

Os apoios de braços podem ser rebatidos para facilitar as transferências. O balde pode ser colocado ou retirado através dos trilhos sob o assento.

Durante o duche, retirar a parte amovível do assento, pois esta não foi concebida para suportar todo o peso do utilizador.

Não se inclinar enquanto estiver sentado na cadeira.

Imagens do Artigo:

