



REHASENSE

mais do que mobilidade



CE

EXPLORER

Rollator todo-o-terreno em alumínio
para exterior



Manual do utilizador



INFORMAÇÕES GERAIS

Caro Cliente,

Este manual do utilizador contém uma descrição do dispositivo médico e orientações importantes para garantir a utilização correta e segura do produto. É importante ler este manual atentamente antes de utilizar o produto. É especialmente importante ler os requisitos de segurança e cumpri-los.

A REHASENSE desenvolve continuamente os seus produtos e reserva-se o direito de alterar as especificações e funções dos produtos sem aviso prévio.

Caso tenha alguma dúvida, contacte o seu revendedor ou a Rehasense diretamente. As informações de contacto encontram-se na última página deste manual.

UTILIZAÇÃO PREVISTA, INDICAÇÕES E CONTRAINDICAÇÕES

Utilização prevista

O andador foi concebido como um auxiliar de locomoção para pessoas com problemas de mobilidade, por exemplo, para se levantarem, caminharem ou sentarem-se de forma autónoma. Graças ao andador, estas pessoas podem levantar-se, caminhar e descansar com facilidade, podendo realizar a maioria das suas tarefas e rotinas diárias sem a ajuda de terceiros. É proibida qualquer outra utilização.

Indicações

O dispositivo foi concebido especificamente para indivíduos que, devido a uma grande variedade de possíveis problemas de saúde, necessitam de um apoio adicional e estável durante a marcha.

Contraindicações

O dispositivo não deve ser utilizado por utilizadores que tenham problemas graves de equilíbrio corporal ou cuja força muscular seja demasiado fraca para conseguirem ficar de pé e caminhar, mesmo com o apoio adicional de um andador. A necessidade e a possibilidade de utilização de um andador pelo utilizador devem ser sempre avaliadas e indicadas por um médico ou fisioterapeuta.

ENTREGA E INFORMAÇÕES GERAIS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os andadores são fornecidos em caixas e vêm dobrados, para facilitar o transporte.

O conteúdo é o seguinte:

- 1 andador completo, dobrado, incluindo assento e cesto
- 1 conjunto de suportes para muletas
- 1 manual de utilização

O Explorer é um andador de quatro rodas, leve, com uma estrutura dobrável em cruz. O produto é fabricado em alumínio, pelo que é leve e fácil de guardar ou transportar. O andador oferece excelente manobrabilidade e estabilidade, e as suas pegas são ajustáveis em altura para um bom ajuste ao utilizador. O produto é composto por uma estrutura dobrável com revestimento em pintura a pó, feita de tubos redondos de alumínio, e por uma cruz dobrável. Está também equipado com um assento em tecido e um cesto de compras, que permite ao utilizador descansar e transportar pequenos objetos.

REQUISITOS DE SEGURANÇA

Certifique-se de que este manual do utilizador é lido por todas as pessoas que utilizam o dispositivo. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos e/ou lesões causados pelo facto de o manual do utilizador não ter sido seguido.

Limitações de utilização




- O dispositivo não deve ser carregado com mais de 200 kg.
- O saco do dispositivo tem um limite de carga de 5 kg.
- O dispositivo foi concebido para ser utilizado em ambientes interiores e/ou exteriores, em superfícies planas.
- O dispositivo não se destina a ser autopropelido enquanto se estiver sentado
- Os travões DEVEM estar na posição bloqueada ANTES de utilizar o assento.

Prevenção de acidentes



- Utilize o dispositivo apenas para o fim a que se destina.
- Utilize o dispositivo apenas quando este se encontre em boas condições técnicas.
- Evite efetuar alterações estruturais no dispositivo, a menos que tenha a autorização por escrito do fabricante para tais modificações.
- Durante os diversos ajustes que podem ser efetuados no dispositivo, o utilizador deve ter cuidado para não prender os dedos ou outras partes do corpo entre dois elementos móveis do dispositivo
- O dispositivo só deve ser utilizado numa superfície estável.
- Todas as rodas DEVEM estar em contacto com o chão em TODOS OS MOMENTOS durante a utilização. Isto garantirá que o andador esteja devidamente equilibrado e deverá evitar acidentes.
- Quando utilizar o andador numa posição estacionária, os travões manuais DEVEM estar bloqueados.

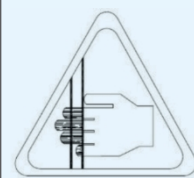

Mind Your Fingers

Tenha cuidado quando vir este símbolo no dispositivo. Os dedos ou outras partes do corpo do utilizador e/ou do assistente podem ficar presos entre as peças do dispositivo durante o processo de dobrar, desdobrar ou ajustar o dispositivo. Tenha extremo cuidado ao ajustar o dispositivo. Observe as dimensões das aberturas entre os elementos do dispositivo para evitar que os seus dedos ou outras partes do corpo fiquem presos.

DETALHES DO PRODUTO



UTILIZAÇÃO

Ao observar a imagem acima, o dispositivo deve ser preparado para utilização de forma intuitiva. No entanto, recomendamos que siga os passos abaixo:

Verificação inicial

Em primeiro lugar, retire o dispositivo da caixa e verifique (com base na imagem acima) se não falta nada. Se, nesta fase, verificar que falta alguma peça ou que alguma está danificada, não continue a montar o produto. Contacte imediatamente o seu fornecedor.

Abertura do andador

- Prima o botão vermelho que bloqueia os tubos do assento
- Segure ambos os tubos do assento e empurre-os simultaneamente para baixo até ouvir um som de «clique» do mecanismo de bloqueio da estrutura. Tente puxar os tubos do assento para cima para dobrar a estrutura. Se isso for impossível de fazer, a estrutura está aberta e fixada corretamente. Veja a posição ABERTA na imagem acima.



- Após desdobrar ou montar o andador, certifique-se sempre de que o apoio do assento está bem bloqueado através do mecanismo de tira de tração para fixar o bloqueio e de que a estrutura já não se move.
- Certifique-se sempre de que ambos os tubos da pega de empurrar estão bem bloqueados no tubo de suporte principal com os dois botões laterais, para evitar que os tubos da pega de empurrar deslizem acidentalmente para dentro quando submetidos a força.
- Verifique sempre se os acessórios estão devidamente e com segurança fixados no lugar ANTES de utilizar o andador.
- O não cumprimento destas advertências pode resultar em ferimentos pessoais.

Dobragem

- Puxe a alça de tração no assento para cima para dobrar o andador.
- Dobre o andador até que o bloqueio se feche.

Ajustar a altura das pegas de empurrar

- Solte o botão de bloqueio das pegas,
- E efetue os ajustes para a altura desejada.
- Aperte o botão.



- Ambas as alças de empurrar devem ser ajustadas à mesma altura.
- As alças corretamente ajustadas devem ficar à altura das ancas do utilizador.
- Nunca deixe o dispositivo sem os travões ativados.

Utilização dos travões manuais

- PARA PARAR O ROLLATOR, basta puxar as alças dos travões para cima, na direção dos punhos.
- PARA PERMANECER PARADO, mantenha as alças dos travões na posição «PARA C»
- PARA COMEÇAR A MOVER-SE, solte as alças dos travões. Estas irão descer automaticamente e os travões serão libertados.



- Deve sempre acionar os travões quando não pretender mover o dispositivo.
- Nunca deixe o dispositivo sem os travões acionados quando houver alguém sentado nele!
- Nunca deixe o dispositivo em declives sem os travões acionados!
- Nunca se sente demasiado para trás. Não se sente (parcialmente) por cima do saco de compras.
- Sente-se sempre direito quando estiver sentado no andador, com os antebraços ou as mãos ligeiramente apoiados nas alças de empurrar.
- Nunca se incline para trás quando estiver sentado no andador

Bloquear/desbloquear os travões manuais

- Para travar os travões, empurre as alças dos travões para baixo até ouvir o

Som de «clique».

- Para desbloquear os travões, puxe as alças dos travões para cima até sentir que se soltam.



Quando utilizar o andador numa posição estacionária, os travões manuais DEVEM estar sempre bloqueados.

LIMPEZA

Geral


- Limpe o aparelho regularmente e mantenha-o limpo.
- A sujidade mais leve e o pó podem ser removidos com um pano húmido.
- A sujidade mais acentuada pode ser removida com um detergente suave, não corrosivo, e água morna.
- Não utilize produtos abrasivos fortes nem produtos de limpeza à base de lixívia, pois isso pode causar danos ou descoloração.
- Seque as peças com um pano macio.

Rodas

- Limpe as rodas com água morna e um detergente suave. Seque com um pano limpo.
- Lubrifique com óleo multiusos periodicamente ou se as rodas começarem a ranger.

ETIQUETA

A etiqueta do produto está colocada num dos tubos inferiores da estrutura principal. Inclui informações importantes sobre o produto: nome, número de série, data de produção, número de artigo, peso máximo do utilizador, carga máxima do saco de compras, largura do produto, tamanho e dados do fabricante. A etiqueta nunca deve ser removida do dispositivo.

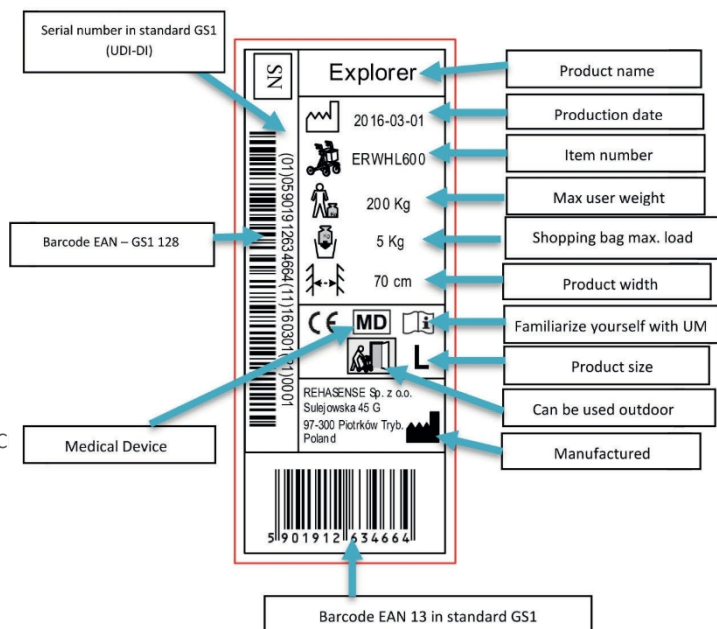

| DADOS TÉCNICOS

Dimensões	M	L
Carga máxima	200 kg	200 kg
Carga máxima do saco	5 kg	5 kg
Peso total sem o saco de compras	9 kg	9,2 kg
Saco de compras	0,4 kg	0,4 kg
Comprimento	76 cm	76 cm
Altura total quando dobrado (mínima)	84 cm	91 cm
Largura aberta	70 cm	70 cm
Largura quando dobrado	25 cm	25 cm
Largura do assento	53 cm	53 cm
Altura dos apoios para as mãos (ajustável)	78 - 90 cm	91 - 112 cm
Altura do assento	53 cm	62 cm
Travões	2 travões de manobra com função de estacionamento	
Rodas (diâmetro x largura)	Dianteiras: 285 x 44 mm – Pneu SOFT PU preto Traseiras: 235 x 44 mm – Pneu SOFT PU preto	

| DESCRIÇÃO DO TRANSPORTE

O andador é um produto facilmente dobrável, prático para o transporte. Se for necessário transportá-lo, recomendamos que o dobre conforme indicado na descrição acima. O andador deve ser transportado de forma a garantir a sua estabilidade e a evitar o risco de movimentos repentinos e perigosos do dispositivo durante o transporte.

| MANUTENÇÃO

- Certifique-se de que todas as peças do andador estão bem fixas em TODAS as ocasiões.
- Verifique se todos os parafusos estão bem apertados. Se não estiverem, aperte-os, se necessário.
- Substitua imediatamente quaisquer peças partidas, danificadas ou gastas.

| REUTILIZAÇÃO

O andador é adequado para reutilização. Antes de o passar para outro utilizador, deve ser submetido a uma inspeção por parte do revendedor especializado.

Devem ser verificados os seguintes pontos:

- Inspeção visual da estrutura
- Fixação segura das porcas e parafusos
- Estado dos elementos de plástico
- Estado das rodas e dos rolamentos de esferas
- Eficácia e estado dos travões

Quando uma das peças estiver danificada ou partida, deve ser substituída por uma nova. Recomenda-se substituir as rodas sempre que houver uma mudança. Todos os parafusos e porcas soltos devem ser apertados.

O produto deve ser cuidadosamente limpo e desinfetado antes de ser reutilizado.

ATENÇÃO! É proibido reutilizar o andador quando a estrutura estiver dobrada ou partida.

O manual de instruções deve acompanhar o andador em todas as trocas.

| COMO ELIMINAR O PRODUTO

O dispositivo não deve ser eliminado juntamente com o lixo comum. Deve ser entregue numa estação de recolha para reutilização ou reciclagem.

| GARANTIA

O fabricante oferece uma garantia de 8 anos para defeitos de fabrico. A garantia não é válida em caso de utilização indevida do produto.



Em caso de problemas técnicos, contacte o seu revendedor.
Pode também contactar diretamente a Rehasense®.

| DISTRIBUIDOR / REVENDEDOR / REVENDEDOR ESPECIALIZADO



ZA Pôle 49 - Boulevard de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
FRANÇA

02 41 96 18 48

serviceclient@identites.tm.fr

| REHASENSE® EUROPA

Fabricante

Rehasense Sp. z o.o.

Sulejowska 45g
97-300 Piotrków Trybunalski
POLÓNIA

Rehasense Alemanha

Briener Straße 25
47533 Kleve, ALEMANHA



REHASENSE