

ANDARILHO TODOTERRENO EXPLORER 826245.M GeriMais

Finalidade: Andarilho de quatro rodas em alumínio, dobrável e leve, desenvolvido como auxiliar de locomoção para pessoas com mobilidade reduzida. Possui assento para descanso, cesto de compras, pegas ajustáveis em altura e travões com função de estacionamento. Adequado para utilização em ambientes interiores e exteriores, em superfícies planas.

Características: Estrutura dobrável em alumínio. 4 rodas com pneus SOFT PU. Cesto com capacidade máxima de 5 kg. Pegas ajustáveis em altura. Travões com função de estacionamento

Lote e data de produção: Ver embalagem

Diretiva Regulamento UE 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: 826245.M

Marca: Rehasense

Dimensões: Carga máxima: 200 kg

Comprimento 76 cm x Largura 70 cm x Altura das pegas 78–90 cm

Largura dobrado 25 cm

Dimensões do assento: L 53 x P 17 x A 53

Peso: 9kg

Rodas Dianteiras: 285 × 44 mm – pneu SOFT PU preto

Rodas Traseiras: 235 × 44 mm – pneu SOFT PU preto

Certificado CE: (ou Declaração de Conformidade)
Regulamento UE 2017/745

Fabricante: Rehasense Sp. z o.o.

Morada do fabricante: Sulejowska 45g - 97-300
Piotrków Trybunalski – POLÓNIA

Distribuidor Europeu: Identités

Morada do distribuidor Europeu: ZA Pôle 49 -
Boulevard de la Chanterie - 49124 Saint-Barthélemy-
d'Anjou - FRANÇA - serviceclient@identites.tm.fr

Distribuidor: Gerimais, Lda.

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão
Pereira, nº 15 - Zona Industrial de Rio Maior -

2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com

Tel. 243 050 100

Manutenção e armazenamento: Verificar regularmente a fixação de todas as peças e o aperto dos parafusos. Substituir imediatamente peças danificadas ou desgastadas. Limpar com pano húmido ou detergente suave e água morna. Limpar e lubrificar as rodas periodicamente. Manter o andarilho dobrado quando não estiver em utilização, de forma a facilitar o armazenamento e transporte.

Instruções de Utilização: Antes da utilização, certifique-se de que o andarilho está corretamente aberto e bloqueado. Ajuste ambas as pegas à mesma altura, de acordo com a altura do utilizador. Para iniciar a marcha, solte os travões. Para parar, puxe as alavancas dos travões para cima. Para permanecer parado, mantenha os travões na posição bloqueada. Antes de utilizar o assento, bloqueie sempre os travões. Ao sentar-se, mantenha uma posição direita e não se incline para trás. Não utilize o andarilho sentado para se autopropulsionar. Utilize-o apenas em superfícies estáveis e certifique-se de que todas as rodas estão sempre em contacto com o chão. Para dobrar, puxe a alça de tração localizada no assento para cima até o mecanismo de bloqueio fechar.

Imagens do Artigo:



 **GeriMais**